

可動式免荷装置

アンウェイシステム

BDX-UWSZ

よりスムーズに、より安全に体重を免荷。アンウェイシステムは起立から歩行におよぶ動作習得を幅広くサポートします。

アンウェイシステムでは、脳卒中や脊髄損傷などで歩行が困難となった場合はもちろん、長期臥床などで体力が低下し、上肢だけでは十分に身体が支えられない症例においても、非常に安定性の高い免荷状態が設定でき、安全で効果的な部分荷重訓練をサポートします。

特に中枢系疾患の自然な歩行
パターンの回復に
免荷歩行は効果的です。

トレッドミルと併用することで、体重移動の仕方や歩行に要する一連の下肢動作の習得が連続して行える上、歩行リズムの回復まで含めた一層の応用練習が可能になります。

セラピストがアプローチ
しやすい「オフセットデザイン」

セラピストが患者の側面から運動のアシストや歩行の指導ができる設計となっています。



※アンウェイシステムとゲイトトレーニングシステム2を
組み合わせた使用例です。



車椅子ご使用の方、小児にも適応します。

SAKAimed
明日に踏み出すチカラ。酒井医療

転倒の危険性を抑制して充実した「免荷」機能を搭載。

バンジーケーブル



安定した免荷歩行を実現する「バンジーケーブル」

バンジーケーブルを利用したサスペンションシステムは安定した免荷状態を保持し、患者が体勢を崩した時にもショックアブソーバーの役割を果たします。また緊急時には、赤色の「セーフティ・タブ」を引くことで、素早くケーブルからセーフティハーネスを外すことができます。さらにケーブル先端のTバーは、車椅子に乗ったままの高さまで降ろせてハーネスと繋がります。

セーフティハーネス BDXU-SH



エアベスト式セーフティハーネス

装着の負担を軽減するエアベスト式を採用。エアを注入できて、胸部の圧迫感を抑えると同時にフィット性を高め、荷重を体幹と下肢とに分散させるデザインになっています。そのため、ある程度長時間の使用においても患者負担を最小限に抑えられます。

※標準で1着付属されています。
また、追加のご購入も可能です。

サポートアーム



高さ調節式で脱着が可能です。患者の両側面を囲んでいて、つかまりやすい形状にデザインされています。

ディスプレイ



免荷量を正確にデジタル表示します。

スツール BDXU-ST



セラピストの姿勢安定用に、スツールを標準装備しています。座位姿勢が安定して指導時の負担が軽減できます。

- 座面寸法
350mm (W) × 300mm (D) × 45mm (H)
- 質量
約2kg

※標準で2枚付属されています。
また、追加のご購入も可能です。

※スツールは1枚単位での販売となります。

仕様	
高さ	2410mm～2700mm
幅	内寸910mm 外寸1270mm
奥行き	1280mm
最大荷重	136kg
免荷範囲	0～68kg
ケーブル上下調節範囲	1520mm
質量	約75kg
電源(ディスプレイ用)	DC9V電池
付属品	エアベスト式セーフティハーネス1式 スツール2枚

参考文献

Visintin M, Barbeau H, et al.: A new approach to retrain gait in stroke patients through body weight support and treadmill stimulation. Stroke 29:1122-1128,1988.

(脳卒中患者の歩行再学習のための体重免荷とトレッドミルを用いた新しいアプローチについて)

Sullivan KJ, Knowlton BJ, et al.: Step training with body weight support: effect of treadmill speed and practice paradigms on poststroke locomotor recovery. Arch phys med rehabil 83: 683-91,2002.

(体重免荷によるステップトレーニング:脳卒中後の移動能力回復におけるトレッドミルスピードと訓練パラダイムの効果)

酒井医療株式会社

東京都文京区本郷3丁目15番9号 〒113-0033

www.sakaimed.co.jp

札幌営業所 Tel: 011-780-5570
盛岡営業所 Tel: 019-656-3221
仙台営業所 Tel: 022-231-4481
新潟営業所 Tel: 025-286-1788
埼玉営業所 Tel: 048-255-0451
千葉営業所 Tel: 047-497-3691
東京営業所 Tel: 03-5800-3076
国分寺営業所 Tel: 042-320-2680
横浜営業所 Tel: 045-944-4478

名古屋営業所 Tel: 052-263-9867
金沢営業所 Tel: 076-223-4420
大阪営業所 Tel: 06-6386-3545
神戸営業所 Tel: 078-811-6031
広島営業所 Tel: 082-871-0420
高松営業所 Tel: 087-841-3144
福岡営業所 Tel: 092-473-8481
鹿児島営業所 Tel: 099-252-5251
白井工場 Tel: 047-497-1911

取扱店



JQA-QMA12289