

昇降式平行棒（電動式）

昇降式平行棒（DC・3.5m） SP-535 ¥720,000

昇降式平行棒（AC・3.5m） SP-635 ¥720,000

SAKAimed
明日に踏み出すチカラ。酒井医療


使用者の状態に合わせた高さを、ワンタッチで選択・調節できる平行棒。

ワンタッチで手すりの高さをスムーズに昇降可能。
さらに、手すりの高さを記憶できるので、効率良く使用できます。

介助者が高さ調節のたびに移動する手間を省きます。
使用者にとっても、歩行練習を効率よく行なうことができます。
また、支柱の間には障害物が無いため、介助者はより使用者に近づいて介助できます。



SP-535 (DC・3.5m)

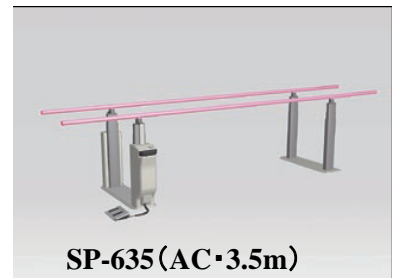

SP-635 (AC・3.5m)

ワンタッチのボタン操作で、手すりの高さ調節が可能。

- 操作は、ボタン1カ所で簡単に行えます。
- 手すりの高さは床から670～1020mmの範囲で、無段階調節が可能です。
- 使用者の体格・状態に合わせた適正な高さに調節することができ、より効果的な歩行訓練が行えます。
- 手すりの幅調節も簡単に行え、0～562mmの範囲で無段階に調節でき、使用者に合わせた調節が行えます。

メモリー機能を搭載し、再現性をUP。

- 高さ設定を3パターンまでメモリー可能。
介助者の負担を軽減し、再現性を高めた、効率の良い歩行練習をサポートします。

介助者が使用者に近づきやすい、すっきりとしたデザイン。

- 支柱の間に障害物が無いため、介助者は使用者のより近位で歩行練習の指示・手技を行えます。
- とっさの際にも、支柱をくぐって使用者を介助しやすいデザインとなっております。

歩行訓練のモチベーションを高める、さらっとした使用感の手すり。

- 塗装と加工の工夫により、手すりはべたつかず、かつ適度な把持感をもっているため、使用者の歩行訓練への意欲を高めます。

安心してお使いいただける、高い安全性。

- 高さ調節中に使用者が手すりに掴まっても、急に下降することがなく安全です。
- 台板の表面は程良い摩擦があり、滑りにくくつまずきにくい設計となっております。

移動や収納も容易。

- 本体は床置きで容易に移動でき、設置スペースを有効活用できます。
SP-535 (DC・3.5m) は電源ケーブルがないので、より簡単に行えます。
- 部屋の隅に寄せるなど収納する際には、幅調節機能で簡単に全体の幅を狭めることができるので便利です。



※SP-535操作部

昇降式平行棒（電動式）

状況に合わせ、2タイプから選べます。

SAKAimed
明日に踏み出すチカラ。酒井医療

ご施設の状況に合わせ、電源コードが無く移動のしやすいバッテリー駆動タイプと、バッテリー交換不要のAC100Vタイプをご用意しました。

昇降式平行棒(DC・3.5m)



SP-535 ¥720,000

移動が容易なバッテリー駆動タイプ。

- ワンタッチ式のボタンで左右の手すりの高さ調節が可能。(左右個別／無段階調節)

[仕様]

- ・外形寸法: 3500(L) × 905(W) × 1020(H)mm
- ・質量: 97kg
- ・手すりの直径: φ38mm
- ・手すりの高さ: 670～1020mm
- ・手すりの高さ調節ストローク: 350mm
- ・手すりの高さ調節ピッチ: 無段階(デジタル表示は10mmピッチ)
- ・手すりの長さ: 3500mm
- ・手すり間の幅(内寸): 0～562mm
- ・手すり昇降方式: 電動アクチュエーター
- ・電源方式: DC24V 2.9Ah(バッテリー仕様)
- ・材質:

台板／スチール・メラミン塗装仕上
手すり／スチール・粉体塗装仕上
エンドキャップ／合成ゴム
支柱／スチール・粉体塗装仕上
操作部カバー／プラスチック(塩ビ)

- ・付属品: バッテリー、充電器

※ 満充電されたバッテリーを使用した場合、175mm(ストロークの½)の調節を約50回

昇降式平行棒(AC・3.5m)



SP-635 ¥720,000

左右の手すりが同時に調節でき、フットスイッチも採用したAC100Vタイプ。

- ワンタッチ式のボタン、またはペダルにて、左右の手すりの高さ調節が可能。(左右同時／無段階調節)

[仕様]

- ・外形寸法: 3500(L) × 890(W) × 1020(H)mm
- ・質量: 94kg
- ・手すりの直径: φ38mm
- ・手すりの高さ: 670～1020mm
- ・手すりの高さ調節ストローク: 350mm
- ・手すりの高さ調節ピッチ: 無段階(デジタル表示は10mmピッチ)
- ・手すりの長さ: 3500mm
- ・手すり間の幅(内寸): 0～562mm
- ・手すり昇降方式: 電動アクチュエーター
- ・電源: AC100V
- ・材質:

台板／スチール・メラミン塗装仕上
手すり／スチール・粉体塗装仕上
エンドキャップ／合成ゴム
支柱／スチール・粉体塗装仕上
操作部カバー／プラスチック(塩ビ)
フットスイッチ／プラスチック

酒井医療株式会社

www.sakaimed.co.jp

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ●札幌営業所 ☎011-780-5570 | ●千葉営業所 ☎047-497-3691 | ●金沢営業所 ☎076-223-4420 | ●福岡営業所 ☎092-473-8481 |
| ●盛岡営業所 ☎019-656-3221 | ●東京営業所 ☎03-5800-3076 | ●大阪営業所 ☎06-6386-3545 | ●鹿児島営業所 ☎099-252-5251 |
| ●仙台営業所 ☎022-231-4481 | ●国分寺営業所 ☎042-320-2680 | ●神戸営業所 ☎078-811-6031 | |
| ●新潟営業所 ☎025-286-1788 | ●横浜営業所 ☎045-944-4478 | ●広島営業所 ☎082-871-0420 | |
| ●埼玉営業所 ☎048-255-0451 | ●名古屋営業所 ☎052-263-9867 | ●高松営業所 ☎087-841-3144 | |