

重症心身障害者用入浴装置

PAT. 047133

エレベートバス ET-401型



Rehabilitation

Sakai

酒井医療販売株式会社

ついにシステム化された入浴装置の誕生！

何といっても介助がラクです。



“ラク”に入浴させることができて能率もグーンとアップ——“腰痛症”がおこりません。“省力”と呼ぶにふさわしい入浴装置がはじめて誕生しました。

●2ウェイ方式のハイスピードな入浴

“筋ジス患者”“ねたきり老人”的入浴に取組んでいる酒井が、“重症心身障害児”を入浴させる装置として独自の技術で開発した入浴システムです。“抱きかかえ動作”をとりのぞき、作業者の介助の姿勢を考慮して新しく設計しました。そのうえ2ウェイ方式によって能率がグーンとアップ——2倍から4倍の効率です。

●コンパクトな“順送システム”化も可能

エレベートする浴槽を中心に、洗浄作業・温浴・清拭作業をパターン化できるこのシステムでは浴室の広さと配置によりベッド一入浴一ベッドの“順送”化も可能、能率は確実に4倍になります。担架にのせたままベッドサイドから浴室へそのまま洗ったり、入浴せたりできますから、“腰痛”はおこりません。

●小さい子どもなら1つの担架で2名入浴

担架の寸法や構造に工夫をはらい、小さい子どもは1つの担架に同時に2名ねかせることができます。もちろんこれで入浴能率はいっそうアップされます。それでも危険はまったくありませんし、担架の扱いもかんたんです。

●“腰痛症”がおこりません

こどもを抱きかかえず、しかもラクな姿勢で介助ができる——これで“腰痛”発生の原因はとりのぞかれました。従来の入浴方式と併用しておられるご施設で“腰痛症”治療中のかたがたがこの装置による入浴介助を担当している、そんな実例があるくらいです。

●スキンシップは決して失われません

今までの戦場のようだった入浴風景が、この装置の登場で一変しました。

余裕のある介助——これが介助者とこどもたちとの新しいコミュニケーションを生みだしています。こどもたちに声をかける、これも余裕ある介助だからこそじゅうぶんにできるのです。体のすみずみをなっとくいくまで洗ってあげてください。





子どもたちは安定した担架に固定されているのです。もうハラハラするところはありません。

●看護の省力化の必需品です



入浴介助がラクになるばかりでなく、総作業時間はグーンと短縮されているはずです。この余裕をひろげてください。すべての看護の面に“つくりだされた時間”が必ずお役に立つことでしょう。“入浴日”は決して特別な日でなくなりました。

2 WAY

- 1 病室からストレッチャーで患者を浴室に運びます。
- 2 ストレッチャーからガイド板を浴槽にかけ渡します。
- 3 患者を担架にのせたまゝ浴槽内に移動させます。
- 4 ボタンを押すだけで浴槽が静かに上昇します。

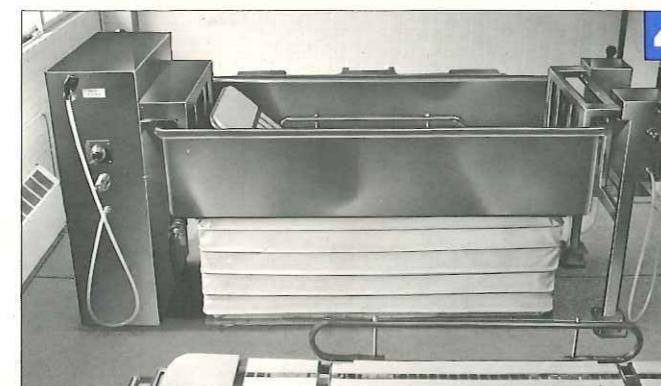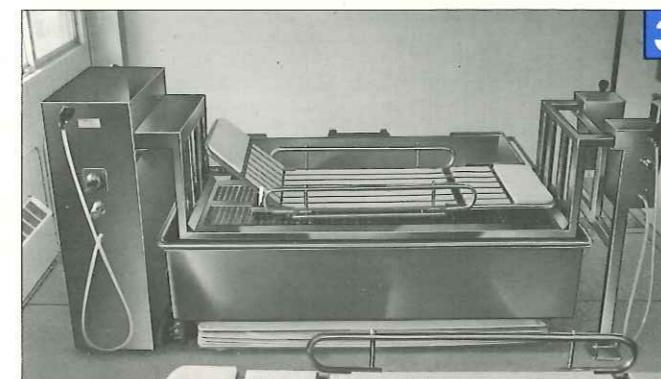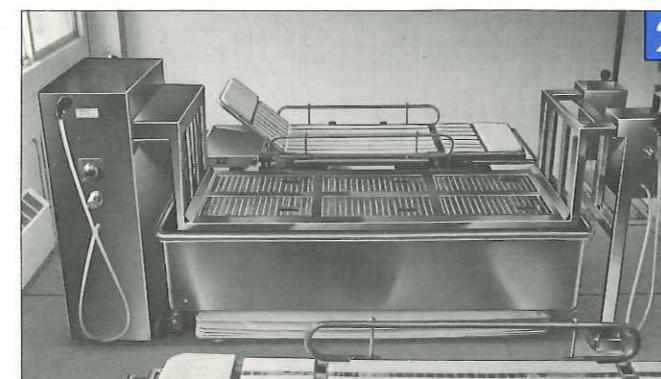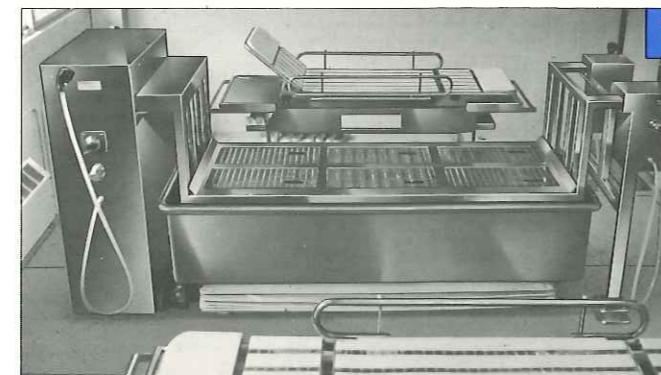

2WAY方式のうちでもこの入浴方式は、ほど順送式に近いもので、左右のストレッチャーから交互に入浴させたり、また下洗・入浴・清拭の順に流れ作業することもできます。この使い方では能率が大巾にアップされますから浴室のスペースによってこの方式をおすすめします。

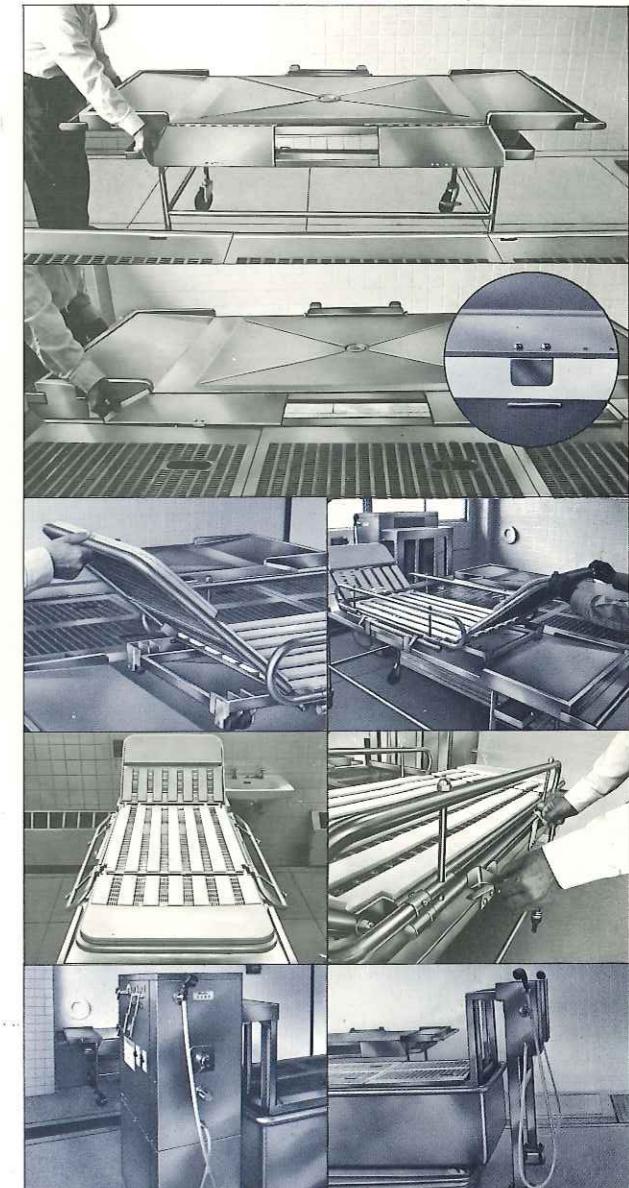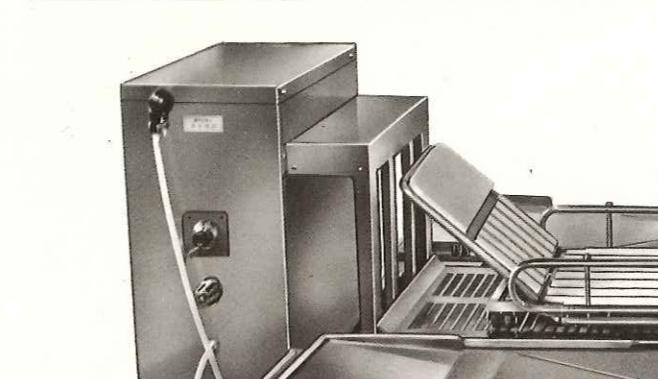

ET-401 標準仕様

| 名 称 | 数 量 | 概(外)寸 | 構 造 | 材 質 | 設 備 規 格 | 附 屬 品 | 備 考 |
|------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| 担 机 架 | 2台 | (L) 1900 (W) 620 (H) 220 | 本体 開閉手すり | ステンレススチール " | | 身体保支バンド 2組 | 座、背、面 特殊スポンジ 仕上、背リクライニング式 |
| ストレッチャー | 2台 | (L) 2080 (W) 660 (H) 710 | 本体 | ステンレススチール | | 担架ストッパー 2個 | キャスター 4個 |
| 浴 槽 (気泡発生) (盤内蔵) | 1台 | (L) 2830 (W) 890 (H) 1360 | 浴槽部 操作部 台座部 昇降動力部 | ステンレススチール " " スチール | 電源3相200V15A " AC100V15A 給湯25(1") 1本 給水25(1") 1本 排水80(3") 堀込 | シャワーセット 4セット 昇降ボタン 1組 バブラー操作ボタン 1組 | 昇降モーター 3相200V 1馬力 送風モーター AC100V 1KW |

注) ●上記仕様は予告なく変更されることがあります。御了承下さい。 ●上記仕様の他、御施設、御注文に応じ御相談させていただきます。

Rehabilitation

Sakai



酒井医療販売株式会社

東京都文京区本郷3丁目31番7号 TEL (03) 814-0411代 〒113