


登 録



商 標

座 位 灌 注 浴 装 置

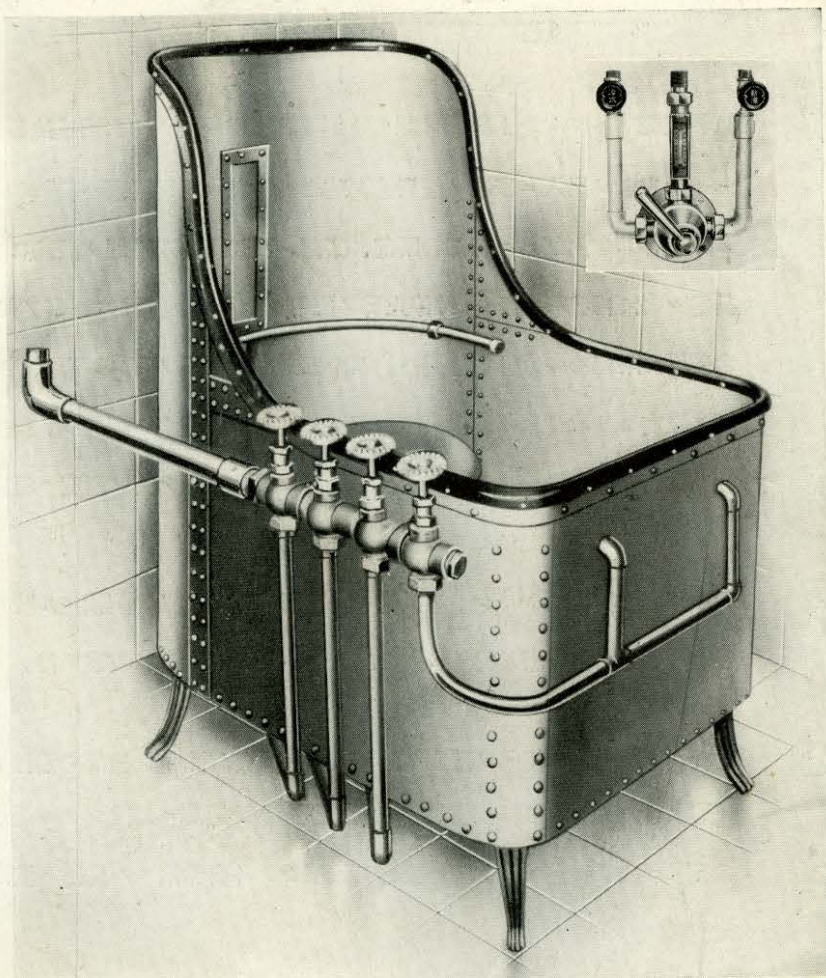

東 京 醫 療 電 氣 機 製 造 所

シーメンス、ライニエーゲル、ウエルケ會社 代理店
富士電氣製造株式會社 特約店
日本無線電信電話株式會社 大販賣店

酒 井 信 正 商 店

東京市本郷區春木町二丁目十五番地
電話小石川(85)三八八〇番

座位灌注浴装置

構造……眞鍮製總「ニツケル」鍍金ヲ施セル極メテ堅牢優美ナル水治療法器具

ニシテ患者ノ出入ニ寒冷ノ接觸感ヲ防止スル爲ニ上端周圍ハ軟「ゴム」ニテ包容ス。内部ニハ脊部、腰部、膝部、及肛門ノ四種類ノ灌注口ヲ具備シ、各自別個ノマーク付停止瓣ヲ使用シテ單獨ニ灌注スル事ヲ得。本装置ニ附屬セル冷温調節瓣ハ約四十五封度ノ水壓ヲ有スル冷水及熱湯ヲ左右ヨリ取り入レ、中央調節部ニテ適當ナル温水ニ調整シ、溫度計ヲ具備セル放出管ヨリ本装置ニ導入スルモノニシテ其ノ溫度ハ溫度計ニヨリテ明瞭ニ表示セラル。

尙本装置ハ排水「カラン」ヲ具備セルヲ以テ、之ノ栓ヲ閉鎖スル時ハ浴槽内ニ温水ヲ充滿シ得ルヲ以テ座浴槽トシテモ利用スル事ヲ得。

使用法……患者ハ裸體ニテ浴槽内ノ圓座椅子ニ腰掛ケ頭部ヲ除キテ他部ヲ備付ケノ防水幕ニテ包围ス。技術者ハ冷温調節瓣ニテ適當ニ加減シタル温水ヲ浴槽ニ送り、備へ付ケノ停止瓣ヲ使用シテ各自希望スル局部ニ灌注スル事ヲ得。

寸法及重量……總高サ 三尺、 幅及奥行 二尺、 重量 約九貫

適應症……神經衰弱症、血管神經症、