

PHYSIO SHOCKMASTER ショックマスターフルセット

① 本体 + ② 専用ワゴン + ③~⑦ 標準付属品セット

標準価格：5,170,000 円 (税別)

定格電圧	AC100 V
電源入力	200VA 以下
定格周波数	50/60Hz
本体寸法	W56 × H114 × D60(cm) ※専用ワゴン部を含む W36 × H18 × D38(cm) ※本体のみ
本体重量	12kg ※専用ワゴン重量：32.5kg
刺激頻度	R-SW モード：単発、連続 0.5 ~ 17Hz V-Actor モード：単発、連続 0.5 ~ 31Hz
刺激強度	R-SW モード：1 ~ 4bar、0.1bar ステップ V-Actor モード：1 ~ 4bar、刺激頻度による



管理医療機器 (クラス II) ・ 特定保守管理医療機器 承認番号 22700BZX00105000
一般名称：振動ヘッド付空気圧式マッサージ器

③ ~ ⑦ 標準付属品 (交換用付属品 / 消耗品)



③ ショートハンドピース

- ・ ハンドピース
- ・ ビームアプリアクター 15mm
- ・ ディープアプリアクター 15mm
- ・ D-Actor アプリアクター 20mm
- ・ O リングセット (交換用)
- ・ レンチ (交換用)
- ・ L レンチ (交換用)
- ・ ガイドチューブ (交換用)
- ・ ピストン (交換用)



ビームアプリアクター 15mm



ディープアプリアクター 15mm



D-Actor アプリアクター 20mm



④ Vアクター
ハンドピースセット

標準価格：390,000 円

- ・ V-Actor ハンドピース
- ・ V-Actor アプリアクター 25mm
- ・ V-Actor アプリアクター 40mm



⑤ リビジョンキット

標準価格：95,000 円

- ・ 交換用 O リング (2 個セット)
- ・ 交換用ピストン (2 個)
- ・ 交換用ガイドチューブ (2 個)

⑥ ゲル



⑦ 電源コード



別売付属品



フォーカスアプリアクター 15mm
標準価格：69,000 円




ポイントアプリアクター 6mm
標準価格：80,000 円



D-Actor アプリアクター 35mm
標準価格：124,000 円



ショートハンドピース交換用再生キット (ハンドル・ガイドチューブ・ピストン)
標準価格：150,000 円

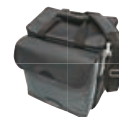

ショックマスター専用キャリーバッグ
標準価格：83,500 円

※ 全て税別価格です

PHYSIO Radial Shockwave SHOCKMASTER

圧力波 (拡散型ショックウェーブ)

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 札幌営業所 (北海道) | Tel: 011-780-5570 |
| 盛岡営業所 (青森・秋田・岩手) | Tel: 019-656-5336 |
| 仙台営業所 (宮城・山形・福島) | Tel: 022-390-6840 |
| 新潟営業所 (新潟) | Tel: 025-278-4777 |
| 長野営業所 (山梨・長野) | Tel: 0263-40-5014 |
| 埼玉営業所 (埼玉・群馬・栃木) | Tel: 048-662-4560 |
| 千葉営業所 (千葉・茨城) | Tel: 047-497-3691 |
| 東京営業所 (東京) | Tel: 03-5227-5779 |
| | Tel: 03-5227-5776 |
| 横浜営業所 (神奈川・静岡) | Tel: 045-590-5485 |
| 名古屋営業所 (愛知・岐阜・三重) | Tel: 052-263-9867 |
| 金沢営業所 (石川・富山・福井) | Tel: 076-292-1161 |
| 関西営業所 (大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山) | Tel: 06-6386-3545 |
| 神戸営業所 (兵庫) | Tel: 078-579-6236 |
| 広島営業所 (広島・岡山・山口・鳥取・島根) | Tel: 082-830-0420 |
| 高松営業所 (香川・徳島・愛媛・高知) | Tel: 087-865-0715 |
| 福岡営業所 (福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄) | Tel: 092-588-9331 |
| 鹿児島営業所 (鹿児島・宮崎) | Tel: 099-252-5251 |

取扱店



臨床・スポーツフィールドへ新たな選択肢をもたらした

圧力波治療[®]

日本で唯一の圧力波治療器[®]*

Radial shockwave

世界65カ国で使用されていた圧力波（拡散型ショックウェーブ）が2015年に日本で初めて承認され、「ショックマスター」は、臨床・スポーツフィールドに新たな治療の選択肢をもたらしました。その間にも臨床データを世界中から収集し、独自の治療プロトコル「トリートメントガイド」のアップデートやハンドピースの軽量化を行ってきました。ショックマスターは進化を続けるユーザーフレンドリーな治療器です。

Shockmaster の納入国

<欧州>

ドイツ、イギリス、スペイン、フランス、イタリア、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、スウェーデン、チェコ、デンマーク、ブルガリア、クロアチア、キプロス、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、チュニジア、ウクライナ、アイルランド、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、セルビア、スロバキア、スロヴェニア、ゲルジア、ギリシャ、ルクセンブルク、リトアニア、ハンガリー

<中東>

サウジアラビア、バーレーン、アラブ首長国連邦、トルコ、イラン、イラク、レバノン、イスラエル、モロッコ、カタール、エジプト

<アジア・オセアニア等>

香港、韓国、中国、バングラデシュ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、インドネシア、スリランカ、オーストラリア、インド、台湾

<北米・南米>

カナダ、チリ、エクアドル、コスタリカ

<アフリカ>

南アフリカ、スーダン、ガーナ、リビア、アルジェリア



* 管理医療機器（クラスII）において

この新しい圧力波エネルギーが
あなたと患者様への新しい力になる。

This new Radial Shock Wave Therapy becomes your new power
to you and the patient.

Hospital

疼痛コントロール
Pain Control

皮膚への触覚刺激及び関節構成体への機械的
刺激により、ゲートコントロール理論が作用し、
痛覚神経線維のインパルスが抑制され、痛みが
軽減されます。また、痛みの軽減により、反射性
筋収縮の改善にも役立ちます。

血液循環改善
Circulation Improvement

疼痛緩和に加えて、圧力波と振動を同時出力する
ショックマスターは血液循環改善に優れ、微小
循環改善にも役立ちます。

筋緊張緩和
Tension Relief

圧力波による触覚受容器への刺激によって、
 α 運動ニューロンに対して抑制的に作用し、筋緊張
を低下させ、関節可動域運動や関節モビライゼー
ションなどを施術しやすくなります。

トッププロのコンディションを
支えるショックマスター。

SHOCKMASTER has supported the top professional condition.

Sports

疼痛緩和・筋疲労回復
Pain relief, muscle fatigue

圧力波療法の有効性は、長期の慢性的な筋や腱
の機能改善において実証されており、近年の事例
とスポーツトレーナーによって様々なスポーツの
障害の改善に結果を表しています。

パフォーマンスアップ
Performance up

トレーニングによる腱にかかる負担を軽減させ、
疼痛緩和・筋疲労の回復に加えて、リラクゼーション
効果によって選手のパフォーマンスアップに大きく
貢献します。



早期回復
Early recovery

受傷後のトレーニングで従来必要とされた休養
期間を短縮し、選手の素早い現場復帰、ケガの
早期回復に役立ちます。

圧力波の原理

Principle of shockmaster

コンプレッサーにより発生させた
圧縮空気をパルス状に開放させ、
ピストンが衝撃体にぶつかること
で圧力波を生み出しています。

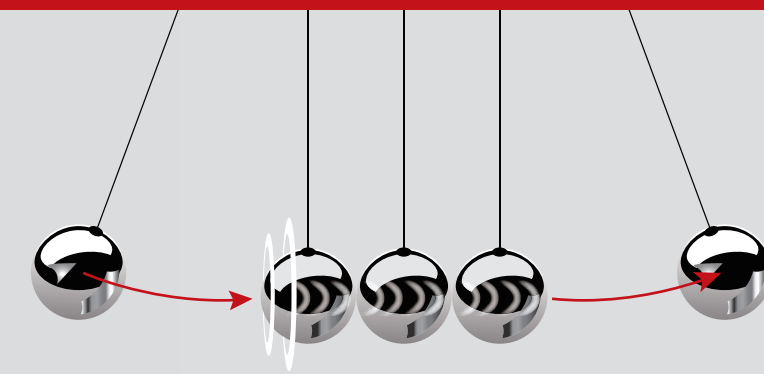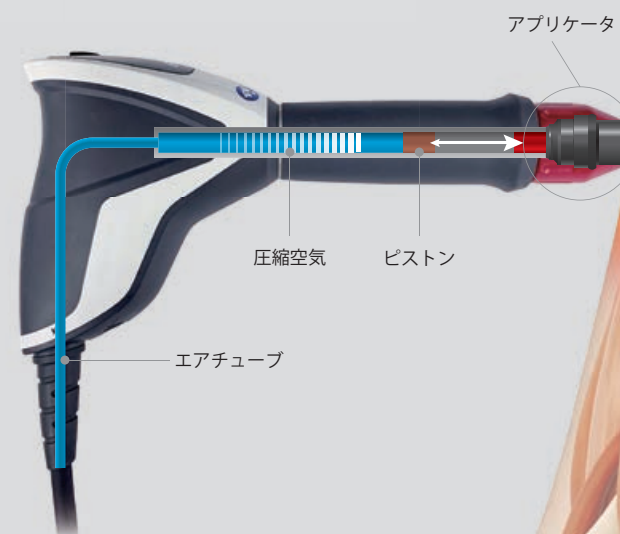

ニュートンのゆりかご Newton's Cradle

圧力波が伝わるしくみは、「ニュートンのゆりかご」に例えられます。1つの金属球を
引っぱって離すと、その球は静止した球に向かって衝突して静止します。この瞬間、球が
ぶつかったのと逆側の球は、最初の球と同じ速さで弧を描いて飛んでいきます。ショック
マスターのアプリケーターはこのエネルギーを伝える静止した球の役割を果たし、圧力波を
発生させます。



圧力波の基本治療 *Radial Shockwave Basic Care*

圧力波によるポイント刺激

ビームアプリアクター（15mm）によるポイント圧力波で集中的に治療します



- ・疼痛緩和

圧力波 × 振動による周辺刺激

Dアクターによる圧力波と同時に振動を加えて患部周辺をほぐす治療を行います



- ・筋緊張の緩和
- ・血液循環の改善
- ・トリガーポイントの治療

振動による全体刺激

Vアクターによる振動で全体をならしめます



- ・代謝活性の刺激
- ・リラクゼーション
- ・微小循環の改善



全身の筋・腱の治療に有効

首から足底まで、ショックマスターの治療部位は全身におよびます。ショックマスターによる圧力波療法は外科的手術が必要とされた患者様へのもう一つの新しい選択肢となっています。


Clinical case No.5 [Sole]

Bar	2.2	Bar	1.6
Hz	10	Hz	15
shocks	2000	shocks	2000-3000
Applicator	Basic	Applicator	D-Actor



症状に応じたトリートメントガイドを搭載

“GTS” Guided Therapy System

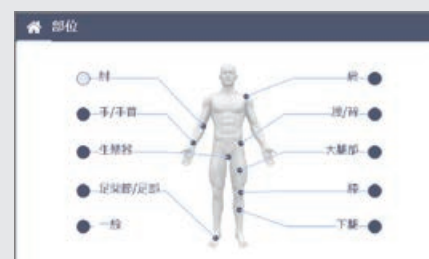

43項目 151例のトリートメントガイド

医学的に実証されたデータに基づく43項目 151例のトリートメントガイドを搭載しています。項目を選択するだけで、照射部位・肢位の説明を表示して、さらに周波数や出力などのパラメータも自動で設定します。

