

豊富な研究・臨床データをもとに開発された

バイオデックスシステムは、全身の各部位(各関節)の筋力を計測し、解析することができる多用途筋機能評価運動装置です。臨床、教育や研究の現場で、30年以上にわたり世界中の障がい・疾患のある方からトップアスリートまで、幅広い対象者の筋機能評価、リハビリテーション、コンディショニングに利用されてきました。これらの豊富な研究データや臨床データをもとに開発された「バイオデックスシステム4」は、新たなアプリケーションソフトを搭載しました。従来の機能はそのままに、新インターフェイスにより、高い操作性を実現しました。また、新たに前十字靱帯損傷患者の競技復帰のアシストするための「Return to Play」(競技復帰)評価メニューの活用も期待されています。



システム4

機能や使用対象で選べる2機種。

システム4	4X
BDX-4X	●フルスペック ●多様な評価パターン
7部位17パターン	●電動シングルシート採用
システム4クイック	40X
BDX-40X	●低価格・シンプルモデル
1部位1パターン	●膝の伸展・屈曲に特化 ●固定シングルシート

高性能かつ安定した構造で、幅広く再現性の高い測定が可能。

低慣性・高性能ダイナモメータを採用

新設計により最大速度500deg/sec、最大トルク680Nmのワイドレンジを実現しました。フルスケールでの誤差が、トルク・速度で±1%以内、角度は1度以下の低慣性・高性能ダイナモメータを採用しています。

安定性の高い構造を実現したT型ベース

シートを支えるT型ベースは、場所をとらない上、安定性の高い構造で動作中も抜群の安定感を発揮。また、シート、ダイナモメータは再現性の高いラック式ロック機能のため、高トルクでもずれる心配がありません。



システム4クイック

高い強度を誇る効率的な電動シングルシート※

高強度電動上下式のリクライニングシートにより、乗り降りがしやすく、ポジショニングもスピーディに。クロス式シートベルト採用のホールド性に優れたシートが、快適で再現性の高い評価を可能にします。
※電動シングルシートはBDX-4Xのみ。

豊富な動作モードに対応

アイソキネティック、アイソメトリック、アイソトニック、リアクティブエキセントリック、パッシブなどの動作モードによる求心性や遠心性の筋収縮の評価やトレーニングに対応します。

バイオデックス システム4シリーズ

新アプリケーションソフト「AdvantageBX」により、さらに快適な操作と多様な解析を実現。



シンプルな画面デザインで簡易操作を実現

- モニター画面に触れるだけのタッチ入力による操作はそのままに、画面デザインはよりシンプルにリニューアルし、流れるようなメニュー操作が可能になりました。
- バイオデックス専用のアプリケーションはマルチ言語対応となっており、メニューやヘルプ機能も日本語対応により快適な操作を実現しています。

測定データをさまざまに解析可能

- トルク・関節角度・角速度などをリアルタイムに表示。時間軸・関節角度軸いずれでも波形解析が可能です。
- 角速度データ中の等速に近い領域のレポートを出力することができます。
- 測定データの生波形を保存・解析できます。また、生波形をフィルター処理したデータも出力可能です。
- すべての波形データはテキスト出力できますので、表計算ソフトなどでのデータの二次活用が可能です。

強化された新データ管理機能

- アドバンテージBXを使用するバイオデックス同士でテストデータとカスタムプロトコルを簡単に共有可能です。
- サードパーティツールで使用するために包括的な計測条件や生データを含む単一・複数のテストデータをエクスポート可能です。

豊富なグラフィックレポートが出力可能

- 立体的かつグラフィックを駆使した各種レポートが簡単に得られます。トルク値のみでなく、パワー、仕事量や加速・減速時間など多くのパラメータをデータ処理し、見やすい日本語のカラーレポートを表示・プリント可能です。
- 新たに「ACL損傷患者の競技復帰レポート機能」を搭載しました。その判断が一目で分かり、結果を明確に理解できます。この独自のレポートは患者やコーチ・指導者に競技復帰準備が完了したという自信を与えます。この評価は、回復途上のアスリートのアイソキネティックテストなどによる最新の調査結果に基づいています。アスリートのACL再建術後の再損傷を低減することが期待されています。

ACL損傷患者の競技復帰評価プロトコル

- 1.動作モード：アイソメトリック
60度屈曲位にて伸展・屈曲ともに10秒計測
- 2.動作モード：アイソキネティック
角速度60、180、300度/毎秒などを使用し伸展・屈曲ともに計測

評価項目

平均ピークトルク、総仕事量、ピークトルク/体重などを使用し年齢と性別ごとの健患比目標値より、筋力面からの競技復帰の判断材料に利用可能。




動作パターン・ROM設定画面



アクティビティ実行画面



データ管理画面

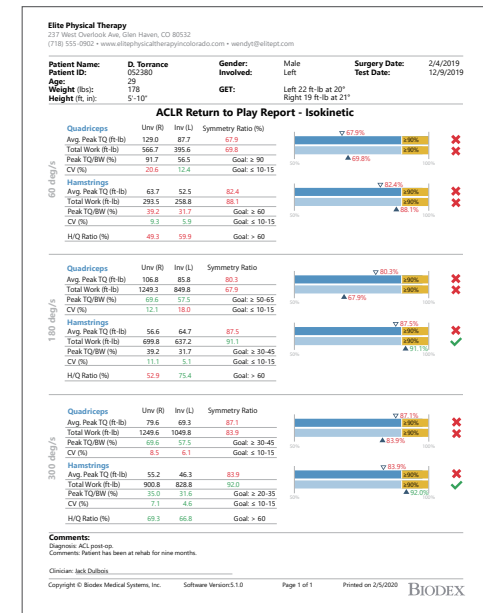

ACL損傷患者の競技復帰レポート例

充実したアクセサリーで、多くの動作

パターンでの評価が可能。

4X 40X 標準装備機種

膝関節 1パターン

伸展・屈曲



4X 40X

足関節 2パターン

底屈・背屈



4X

回内・回外



4X

股関節 4パターン

外転・内転
(側臥位)



4X

伸展・屈曲
(仰臥位)



4X

外転・内転
(立位)



4X

肩関節 6パターン

内旋・外旋
(中間位)



4X

内旋・外旋
(90度外転位)



4X

伸展・屈曲



4X

外転・内転



4X

対角運動
(座位)



4X

対角運動
(立位)



4X

手関節 2パターン

掌屈・背屈



4X

橈屈・尺屈



4X

前腕 1パターン

回内・回外



4X

便利なアクセサリーカート

多彩なアクセサリーを省スペースで収納可能。移動も手軽なアクセサリーカートです。(キャスターロック機能付)



4X

オプションを追加することにより、測定領域がさらに拡大。

4X 4QX 4 4C 4Q オプション適合機種

中枢疾患用上肢アタッチメント

BDX4-UE

ニューロリハビリテーション対応の軽量上肢用アタッチメントです。標準の上肢用アタッチメントに比べ軽量かつ独自の固定機能や肌に優しい素材の採用によって、中枢疾患者などの弱化した上肢の筋力評価やエクササイズに適しています。機能的な課題遂行型運動と組み合わせる事でさらなる機能改善につながります。

- ・カーボンファイバー採用による軽量かつ高い耐久性
 - ・把持しなくても利用可能なグリップレスデザイン
 - ・左右交換時に付け替え不要な内蔵ROMリミッター
 - ・敏感な肌のためのソフトなパッド&ベルト
- 【構成】ニューロショルダーアタッチメント、ニューロエルボー/ショルダーアタッチメント、ニューロリストアタッチメント、ニューロリストアビライザーアタッチメント



肩関節 内旋・外旋



肩関節 外転・内転



肩関節 伸屈・屈曲



肘関節 伸展・屈曲(従重力位)



手関節 掌屈・背屈

バックアタッチメント

BDX4-BA

体幹筋力（腹筋群/背筋群）の評価及び運動が可能。ポジションも座位と半臥位の2通りの使い分けができます。

外形寸法	1250(W)×1450(D)×1750(H)mm
質量	約100kg

【座位ポジション】
より体幹の独立性を保った状態での計測に適しています。
【半臥位ポジション】
足底部を着けて下肢の安定性を保った状態でテストが行えます。



ワークシミュレーションアタッチメント

BDX4-WS

上肢の日常生活動作を再現する各種の運動パターンを提供。ステアリングやレンチ、グリップ、ピンチなど10種のラインアップにより、ADLトレーニングのシミュレーションが可能です。

【構成】マルチプルツールアダプタ、上肢用ハンドル、リボルビングハンドル、クリュードライバー、球面グリップ、上肢用レンチ、3点把持グリップ、精密ピンチ、回転用ピンチ、平行把持グリップ 各1個



ACL用 アタッチメント

BDX4-ACL

ACL疾患用アタッチメント。膝関節伸展時の脛骨の前方引出しを軽減させます。デリケートな手術後の筋力評価やリハビリテーションに有用です。

【構成】左右各1個



クローズドチェーンアタッチメント

BDX4-CKC

単関節では難しい、より機能的な複合多関節動作が可能。上肢用のグリップと下肢用のフットプレートなどを装備しています。可動域、速度、運動モードなどを制御しながら多様なエクササイズが可能です。 ※力の計測単位はN（ニュートン）表示可能

【構成】アタッチメント本体、フットプレート、ハンドグリップ 各1個

スピード	0~90cm/sec(450度/秒)
フォース	最大890N
ストローク	最大約46cm



ハムストリング用アタッチメント

BDX4-HAM

ハムストリングの傷害や再損傷低減のための2種類の評価を行う新たなツールです。専用のレポートにより、ハムストリング傷害のスクリーニングやリハビリテーションの進捗管理、競技復帰の判断などに有用です。 ※4QX、4Qに追加の場合は別途部品（アーム&レッグサポート、スモールアダプタ）が必要です。

1.マルチアングル比テスト


ハムストリング伸張肢位を含む4角度でアイソメトリック屈曲ピークトルクを計測しその左右差にて評価を行います。

2.ミックスH/Q比テスト

ハムストリングのエキセントリックとクワドリセプスのコンセントリックのピークトルク比により評価を行います。



【構成】左右各1個

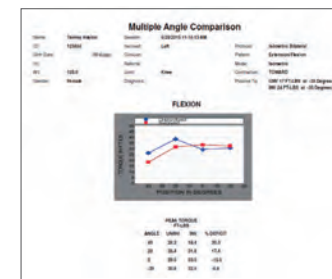

マルチアングル比評価



小児用膝アタッチメント

BDX4-PK(膝)

小児のための膝関節用と肩関節用アタッチメント。正確な測定及び運動を行うために使用します。

【構成】左右各1個

ダイヤモンド回転軸からパット中心まで

小児用肩アタッチメント

BDX4-PS(肩)

【構成】1個

膝用/約150~230mm 肩用/約310~630mm

アドバンテージBX PCパック

BDX-4BXP

新アプリケーションソフト「アドバンテージBX」を標準搭載したパッケージ。システム4シリーズ専用でWindows7PCからWindows10PCへの更新用です。

OS	Windows10Enterprise2019LTSC (日本語)
CPU	Intel® Pentium G5420 3.8GHz以上
メモリ	4GB以上
HDD	500GB以上
データベース	Microsoft SQL Server
モニター	タッチスクリーン型 21.5インチ (16:9)
キーボード	日本語無線式
マウス	無線式
アプリケーションソフト	バイオデックスアドバンテージBX (日本語対応)

※プリンタは付属しません



肩関節用アップグレードキット

BDX4-UGS

BDX-4Cに肩関節用アタッチメント・肘関節用アタッチメントとソフトウェアを追加します。

※4Cモデルのアップグレード用キットシリーズです。構成やアプリケーションソフトの詳細はお問合せください。

股関節用アップグレードキット

BDX4-UGH

BDX-4Cに股関節用アタッチメントとソフトウェアを追加します。

手関節用アップグレードキット

BDX4-UGW

BDX-4Cに手関節・前腕用アタッチメントとソフトウェアを追加します。