


CATTLEYA


スクーピングバス カトレア CTA-200

標準配置図

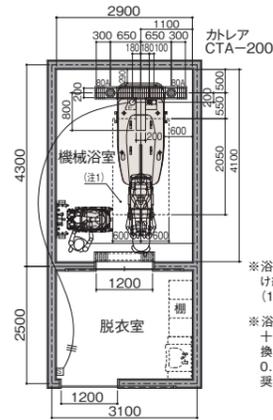


※浴室の床勾配はできるだけ緩やかにしてください。(1/150位まで)
※浴室の換気、換気には十分注意してください。換気能力は1㎡あたり0.33m³/min以上を推奨いたします。

浴槽 CTA-200
(単位:mm)

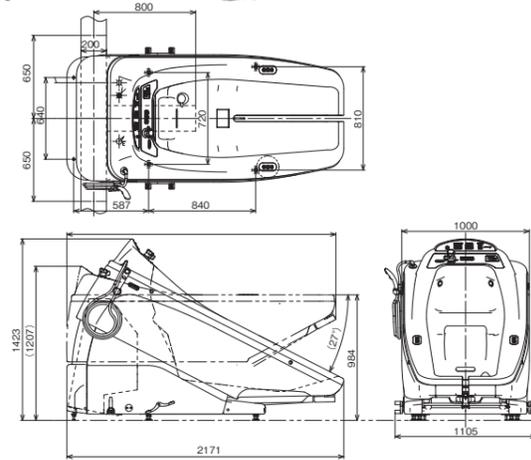

入浴用車椅子
BWC-165
(単位:mm)

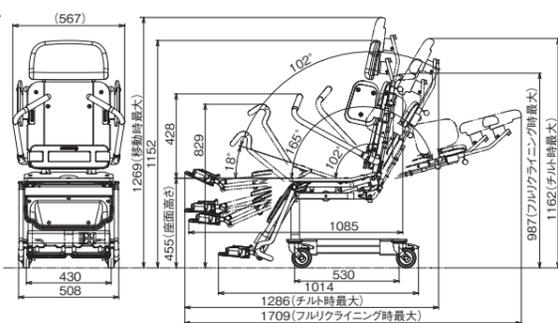

スクーピングバス カトレア CTA-200

設備	仕様	工事区分
給湯水	給湯温度：60℃～65℃(立ち上がり位置での温度) 給湯水圧力:150～200kPa(1.5～2.0kgf/cm²)※圧力変動を極力避けてください。 湯水圧力比:2:1～1:2以内 流量:19.1L以上/min(湯水共) 給湯器(号数):50号 (設備)立ち上げ:各20A 床面ホールバル止め 立ち上げ高さFL+120以内に取付けてください ※各々、浴室または浴室近辺に元バルブを設置ください。	設備工事
排水	排水ピット:深さ200mm 溝幅200mm 排水目皿:80A×2ヶ所 浴槽容量:283L 必要排水能力:0～60秒 249L	建築工事 設備工事
電源	電圧:単相100V 50/60Hz 所要電圧容量:640/780VA (設備)立ち上げ:PP管呼び16 床面立ち上げ 長さ:1000mm 電線:1.6mm又は2.0mm×3芯 PP管幅より300出してください。 アース:D種接地工事 手元開閉器:単相100V15A防雨型(浴室外に設置ください) 漏電遮断器:単相100V15A(浴室外の配電盤に設置ください) 高感度高速度 感度電流30mA 動作時間0.1秒以内 ※電源は単独の専用回路にしてください。	電気工事

注1) ----- エリア内は車椅子が通過するため排水勾配を1/200以下とし、他の床面とならばにつなげてください。
注2) 排水路は有効開口1200mm以上、有効通路幅2000mm以上が必要です。

スクーピングバス カトレア CTA-200 仕様

名称・型番	寸法	構造・材質	設備規格	備考
浴槽 CTA-200	外形寸法 2171(L)×1105(W)×1423(H)mm 浴槽内寸法 1648(L)×612(W)×577(D)mm	浴槽:カバー/FRP フレーム/スチール/粉体塗装仕上げ	電源:単相100V 15A 電力:450W(50Hz) 670W(60Hz) 電源入力:640VA(50Hz)、780VA(60Hz) 給湯水:各20A 排水:80A配込内2ヶ所	浴槽容量:約283L 実使用湯量:約182L(入浴者165cm、65kg) 質量:約315kg 貯湯タンク容量:約270L オプション:気泡浴装置 CTA-10、シールカバー CTA-20
入浴用車椅子 (チルト& フルリクライニング式) BWC-165	外形寸法 標準姿勢: 1014(L)×567(W)×1269(H)mm チルト時: 1286(L)×567(W)×1162(H)mm フルリクライニング時: 1709(L)×567(W)×987(H)mm	フレーム/ステンレス ヘッドレスト/プラスチック(PE) フットレスト/プラスチック(PP) マット(背もたれ、座面)/プラスチック(EVA) マット(レッグサポート)/プラスチック(PE) マット(サイドサポート)/プラスチック(EVA) アームサポート/ステンレス(グリップ付) サポートハンドル/ステンレス(グリップ付) パッド/プラスチック(PE):1ヶ 踵受け/プラスチック(EVA)	---	質量:約47kg 最大使用者体重:100kg 座面高さ:455mm キャスター:φ100mm(4輪にストッパー付) 背もたれ角度(水平より):標準姿勢102°、 チルト時102°、フルリクライニング時165° 座面角度(水平より):標準姿勢0°、チルト時18°
入浴用車椅子 (チルト式) BWC-155	外形寸法 標準姿勢: 1014(L)×567(W)×1269(H)mm チルト時: 1264(L)×567(W)×1162(H)mm	フレーム/ステンレス ヘッドレスト/プラスチック(PE) フットレスト/プラスチック(PP) マット(背もたれ、座面)/プラスチック(EVA) マット(レッグサポート)/プラスチック(PE) アームサポート/ステンレス(グリップ付) パッド/プラスチック(PE):1ヶ 踵受け/プラスチック(EVA)	---	質量:約41kg 最大使用者体重:100kg 座面高さ:455mm キャスター:φ100mm(4輪にストッパー付) 背もたれ角度(水平より):標準姿勢102°、チルト時102° 座面角度(水平より):標準姿勢0°、チルト時18°

※上記仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 札幌営業所 (北海道) | Tel:011-780-5570 |
| 盛岡営業所 (青森・秋田・岩手) | Tel:019-656-5336 |
| 仙台営業所 (宮城・山形・福島) | Tel:022-390-6840 |
| 新潟営業所 (新潟) | Tel:025-278-4777 |
| 長野営業所 (山梨・長野) | Tel:0263-40-5014 |
| 埼玉営業所 (埼玉・群馬・栃木) | Tel:048-662-4560 |
| 千葉営業所 (千葉・茨城) | Tel:047-497-3691 |
| 東京第1営業所 (東京23区) | Tel:03-5227-5779 |
| 東京第2営業所 (東京都下) | Tel:03-5227-5779 |
| (フィジオ) | Tel:03-5227-5776 |
| 横浜営業所 (神奈川・静岡) | Tel:045-590-5485 |
| 中部第1営業所 (愛知) | Tel:052-263-9867 |
| 中部第2営業所 (岐阜・三重) | Tel:052-263-9867 |
| 金沢営業所 (石川・富山・福井) | Tel:076-292-1161 |
| 関西第1営業所 (京都・滋賀・奈良・和歌山) | Tel:06-6386-3545 |
| 関西第2営業所 (大阪) | Tel:06-6386-3545 |
| 神戸営業所 (兵庫) | Tel:078-579-6236 |
| 広島営業所 (広島・岡山・山口・鳥取・島根) | Tel:082-830-0420 |
| 高松営業所 (香川・徳島・愛媛・高知) | Tel:087-865-0715 |
| 福岡営業所 (福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄) | Tel:092-588-9331 |
| 鹿児島営業所 (鹿児島・宮崎) | Tel:099-252-5251 |

取扱店



A113 2018.09



初めて使う方でも安心の簡単操作。 一人でもスムーズに入浴ケアが行えます。

一人ひとりお湯を入れ替える座位入浴装置カトレアが、さらに簡単に操作できるようになりました。初めての方でも戸惑うことなく、安心して介助にあたれます。



SAFETY

安心して見守れる対面入浴。

介助する方とご利用者が向かい合う進入方式なので、全身の身体状況を確認でき、より安全に入浴できます。

姿勢を安定させるチルト機構

背もたれと座面の角度を保ったまま後ろに倒れる「チルト機構」。臀部にかかる体圧を背中に分散でき、姿勢を安定させます。



視認性に優れた大型操作パネル




RELAXED

肩までゆったり浸かれる浴槽水深。

浴槽水深が約10cmアップ(従来比)。大柄な方でもたっぷり浸かれる深さです。また、給湯時には浴槽縁から-11cmの位置で一旦停止し、スイッチひとつで必要な分だけ足し湯ができます。

一旦停止位置
(浴槽縁-11cm)

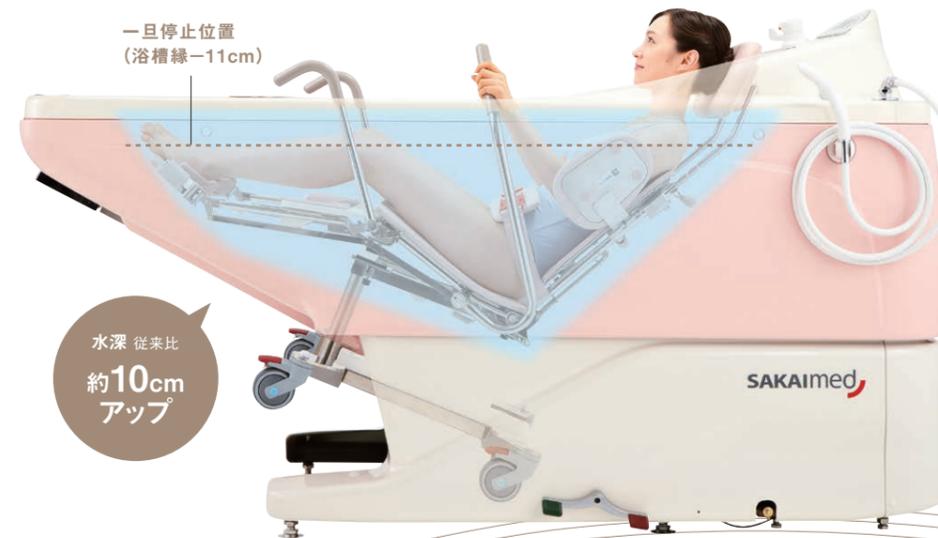

水深 従来比
約10cm
アップ

火傷の危険を防止する湯温管理システム

貯湯タンクには36~47℃のお湯、浴槽には36~45℃のお湯しか送湯できない二重の安全装置を内蔵。ハンドシャワーの湯温が44℃以上の時には操作パネルのハンドシャワー高温警告ランプが点滅してお知らせします。



SAVING

1人でも安心して洗身が可能。

入浴用車椅子をフルリクライニングさせることで、臀部の洗身が1人で行えます。(BWC-165のみ)



転落を防止する上肢用サイドサポート
洗身時には転落を防止、入浴時には適切な姿勢保持をサポートします。(BWC-165のみ)



椅子の後ろからのアプローチが可能
ヘッドレストを引き上げれば、椅子の後ろから座り直しの介助が行えます。



EASY

簡単操作でスムーズに浴槽と連結。

入浴用車椅子を一体構造にすることで、連結時や操作中の音と振動を軽減。また、浴槽との連結操作がスムーズに行えます。

スイッチを押すだけの簡単操作

操作がシンプルなので、初めて使う方でも迷うことなく安心して操作できます。



掃除がしやすいシンプル構造

浴槽内に凹凸がなく、浴槽下もすっきりとした構造なので、浴槽や浴室の掃除が簡単です。



オプション

気泡浴装置 CTA-10
音の静かなエアープンプで発生させた気泡による快適な入浴が楽しめます。

シールカバー CTA-20
浴槽底面中央部のシール部を覆い、フットケアの際にご利用者の足と接触するのを防ぎます。

2タイプの入浴用車椅子

BWC-165
(チルト&フルリクライニング式)



BWC-155
(チルト式)

