

標準付属品		超音波プローブ 58,000円		ACアダプタ 5,400円		電源コード 8,550円		超音波ジェル（260ml） 950円
別売付属品		超音波プローブ 平型固定タイプ 48,000円		固定ベルト (1.2m) 1,800円		ワゴン（型式：P-SONO-W） W550 × H700 × D360 (mm) 18,000円		超音波ジェル 1,000ml 2,500円 5,000ml 12,000円
消耗品								

※ 全て税別価格です



急性期、慢性期にDUTYモード設定

DUTY(間欠モード)設定によって、急性期にはマイクロマッサージによる非温熱効果、慢性期には軟部組織の伸張性向上や疼痛緩解などの治療に温熱効果を活用できます。



※ 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります

販売名： **フィジオ ソノ** 型式： P-SONO

本体＋標準付属品セット 標準価格：698,000 円（税別）

本体＋標準付属品＋平型固定プローブセット 標準価格：747,800 円（税別） 型式：P-SONO-S-B001

一般的名称：超音波治療器（JMDN コード：11248000）

医療機器認証番号：230ALBZX00001000

管理医療機器（クラスⅡ）・特定保守管理医療機器

【使用目的、効能又は効果】 超音波の熱及び非熱生理学的反応による疼痛の緩解、微小マッサージ作用、筋肉痛及び関節痛の軽減

定格電源：ACアダプター	AC100 - 240V / 50 - 60Hz
電源入力：ACアダプター	95VA
定格電源：バッテリー	DC14.4V / 3,000mAh(リチウムイオン電池)
電源入力：バッテリー	40VA
超音波周波数	1MHz、3MHz、1 & 3MHz
最大有効強度	2.0W/cm ² (連続)、3.0W/cm ² (パルス)
BNR（ビーム不均等率）	1MHz:超音波プローブ:2.7、平型プローブ:1.8 3MHz:超音波プローブ:2.4、平型プローブ:2.6
DUTY（間欠モード）	5、10、20、30、40、50、100 %
タイマー	1～30分
本 体 寸 法	W250 × H88 × D170 (mm)
本 体 重 量	2.1kg ※ バッテリー含む

EMC規格 適合品

EMC規格について：Electromagnetic Compatibility の略で電磁両立性のこと。機器が電磁妨害を与えず、かつ受けたとしても影響を受けないことをクリアした機器が受けられる認証。本製品は JIS T 0601-1-2：2012 に適合しています。

酒井医療はスポーツセーフティジャパン®と
「スポーツが安全に行なえる環境づくり」に
取り組んでいます



スポーツの安全に関わるセミナーや講演を
行なっています。お気軽にお問い合わせください。

NPO 法人スポーツセーフティジャパン 代表理事
酒井医療株式会社 アドバイザー

佐保 豊

JOC（日本オリンピック委員会）医科学強化スタッフ
男子アイスホッケー日本代表 ヘッドアスレティックトレーナー
経歴： フットサル日本代表、名古屋グランパスエイト、西武プリンスラビッツ
（アイスホッケー）、チリ代表サッカーチーム、チリプロサッカーチーム、
NHL アナハイムマイティダックス等
資格： NATA 全米公認アスレティックトレーナー（ATC）
NSCA 全米公認ストレングス&コンディショニングスペシャリスト（CSCS）



酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

札幌営業所（北海道） Tel：011-780-5570
盛岡営業所（青森・秋田・岩手） Tel：019-656-5336
仙台営業所（宮城・山形・福島） Tel：022-390-6840
新潟営業所（新潟） Tel：025-278-4777
長野営業所（山梨・長野） Tel：0263-40-5014
埼玉営業所（埼玉・群馬・栃木） Tel：048-662-4560
千葉営業所（千葉・茨城） Tel：047-497-3691
東京第1営業所（東京23区） Tel：03-5227-5779
東京第2営業所（東京都下） Tel：03-5227-5779
（フィジオ） Tel：03-5227-5776
横浜営業所（神奈川・静岡） Tel：045-590-5485
中部第1営業所（愛知） Tel：052-263-9867
中部第2営業所（岐阜・三重） Tel：052-263-9867
金沢営業所（石川・富山・福井） Tel：076-292-1161
関西第1営業所（京都・滋賀・奈良・和歌山） Tel：06-6386-3545
関西第2営業所（大阪） Tel：06-6386-3545
神戸営業所（兵庫） Tel：078-579-6236
広島営業所（広島・岡山・山口・鳥取・島根） Tel：082-830-0420
高松営業所（香川・徳島・愛媛・高知） Tel：087-865-0715
福岡営業所（福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄） Tel：092-588-9331
鹿児島営業所（鹿児島・宮崎） Tel：099-252-5251

※掲載の記述・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
※記載内容については予告なく変更する場合があります。

取扱店



PHYSIO SONO

フィジオ ソノ 超音波治療器 P-SONO


医療機器認証番号：230ALBZX00001000
管理医療機器（クラスⅡ）・特定保守管理医療機器

浅部・深部・広範囲に 幅広く使える超音波治療器

1つの超音波プローブで、浅部モード、深部モード、さらに全体を広範囲でカバーできるオルタネートモード発信も可能です。カラータッチパネルのシンプルな操作、バッテリー搭載で持ち運びもでき、院内からスポーツ現場まで、様々な場所でお使いいただけるコストパフォーマンスに優れた超音波治療器です。

0.1W/cm² の 低出力超音波も発信

3MHz、1MHz、高速で切り替えながら発信するオルタネートモードに加えて、急性期に適用できる0.1W/cm²の低出力超音波も出力可能です。

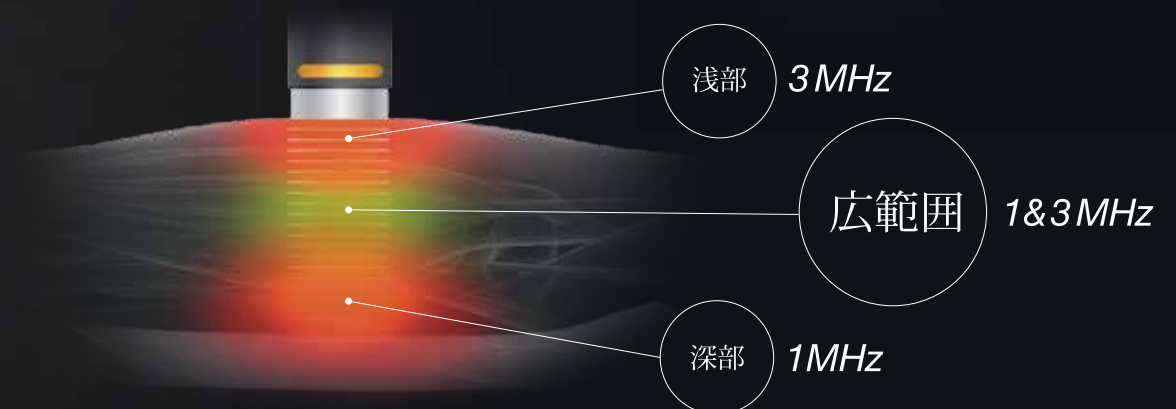

- 慢性期 -

温熱

Thermal effect

- 急性期 -

音圧

Micro massage

フィジオソノは

慢性期の温熱+音圧(非熱マイクロマッサージ作用)と、急性期の0.1W/cm²低出力超音波の音圧作用が一台で行えます。

平型固定タイププローブを使用すれば、プローブを固定した状態での低出力超音波治療も可能です。

30分駆動

バッテリーを搭載

AC/DC両対応

屋外など、コンセントによる電源供給ができない場所でも30分の駆動が可能です。

※ 3MHz 出力、Duty100%、2.0W/cm² で約 50 分
1MHz 出力、Duty100%、2.0W/cm² で約 1 時間

カラータッチパネル

3.5インチカラータッチパネルを搭載。直感的な操作で簡単に治療が行えます。



急性期疾患に使える
平型固定タイププローブ

別売付属品

急性期の疾患に対して、固定式低出力超音波治療も可能。

※ DUTY 設定あり。固定のためのベルトは別売付属品です。



マグネット吸着

超音波プローブは本体側面の他、スチール面であればお使いのワゴンなど、どの場所にも吸着します。

※ 平型プローブはマグネット吸着しません。



頸部



1&3
MHz

腰



1
MHz

Q.L.S



1
MHz

肘



3
MHz

足



3
MHz

指



3
MHz

+ PHYSIO ACTIVE HV

接続するだけで コンビネーション治療


より高い効果性

短時間化

Combination

低周波治療器 フィジオアクティブ HV の出力コードをフィジオソノに接続するだけで、超音波プローブから超音波と同時に、フィジオアクティブ HV のハイボルテージ電流出力が可能です。

※ フィジオ アクティブ HV (認証番号 227ALBZX00014000)

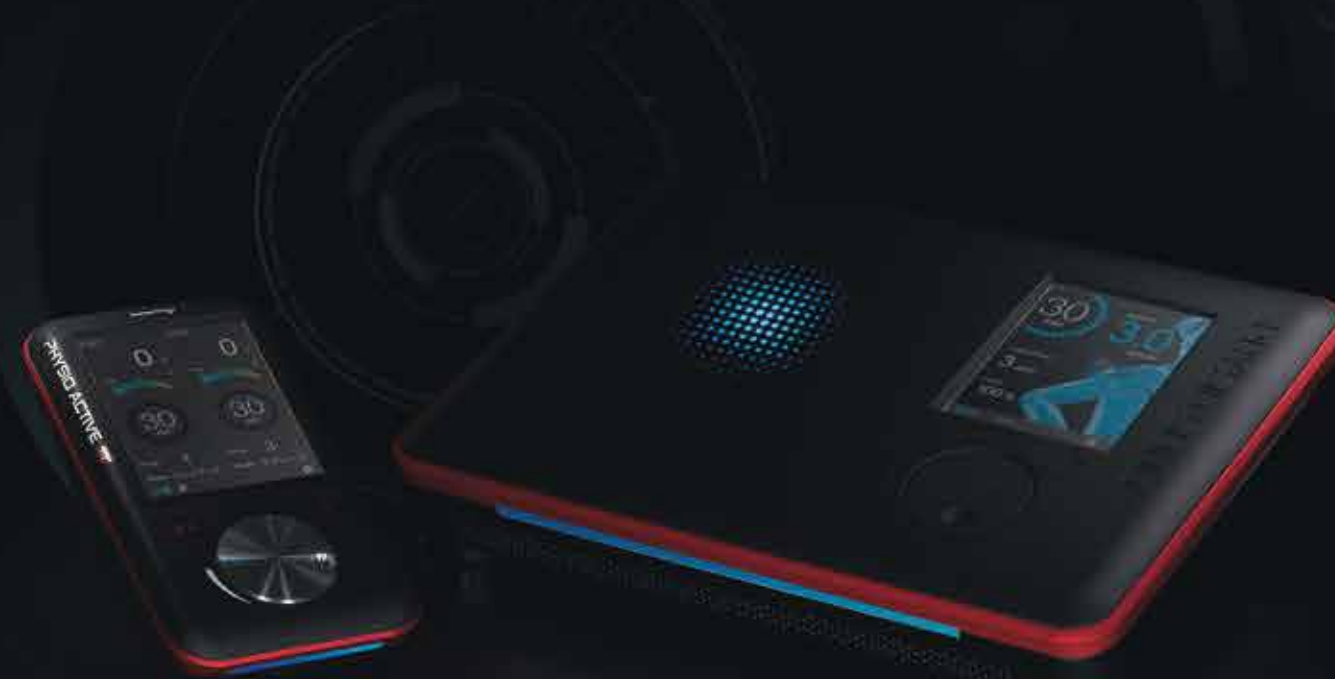

1 step



フィジオアクティブ HV の出力コードを、フィジオソノ背面に接続（専用の接続ケーブルなどはありません）

2 step



フィジオアクティブ HV の電流の出力を上げるだけで、フィジオソノの超音波プローブから電流が出力されます

3 step



超音波による温熱効果+音圧（マイクロマッサージ）と、ハイボルテージ電気療法によるコンビネーション治療が可能になります



平型固定タイプ
プローブでも出力
可能です