




標準付属品
消耗品

※プローブの交換時や、追加購入時には本体との同期調整が必要なため、本体を一度お預かりする必要があります。

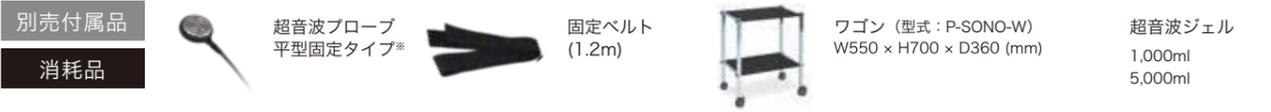

別売付属品
消耗品

※プローブの交換時や、追加購入時には本体との同期調整が必要なため、本体を一度お預かりする必要があります。



販売名: **フィジオ ソノ** 本体 + 標準付属品セット 型式: P-SONO

本体 + 標準付属品 + 平型固定プローブセット 型式: P-SONO-S-B001

一般的名称: 超音波治療器 (JMDN コード: 11248000)
医療機器認証番号: 230ALBZX00001000
管理医療機器 (クラスII)・特定保守管理医療機器

【使用目的、効能又は効果】 超音波の熱及び非熱生理学的反応による疼痛の緩解、微小マッサージ作用、筋肉痛及び関節痛の軽減

定格電源: ACアダプター	AC100 - 240V / 50 - 60Hz
電源入力: ACアダプター	95VA
定格電源: バッテリー	DC14.4V / 3,000mAh(リチウムイオン電池)
電源入力: バッテリー	40VA
超音波周波数	1MHz、3MHz、1 & 3MHz
最大有効強度	2.0W/cm ² (連続)、1.5W/cm ² (パルス)
BNR (ビーム不均等率)	1MHz:超音波プローブ:2.7、平型プローブ:1.8 3MHz:超音波プローブ:2.4、平型プローブ:2.6
DUTY (間欠モード)	5、10、20、30、40、50、100 %
タイマー	1~30分
本体寸法	W250 x H88 x D170 (mm)
本体重量	2.1kg ※ バッテリー含む

EMC規格適合品 EMC規格について: Electromagnetic Compatibility の略で電磁両立性のこと。機器が電磁妨害を与えず、かつ受けたとしても影響を受けないことをクリアした機器が受けられる認証。本製品は JIS T 0601-1-2: 2012 に適合しています。

急性期、慢性期にDUTYモード設定

DUTY(間欠モード)設定によって、急性期にはマイクロマッサージによる非温熱効果、慢性期には軟部組織の伸張性向上や疼痛緩解などの治療に温熱効果を活用できます。



※ 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります



総合リハビリテーション機器メーカーとして

酒井医療は1881年の創業以来、「エビデンス(根拠)にもとづくリハビリテーション手法」の確立に向けて高品質・高精度なリハビリテーション機器の開発を行っています。



本社ショールーム Tokyo Lab

スポーツ選手・団体のコンディショニングをサポートしています。

オフィシャルサプライヤー(敬称略)

- ・大迫傑
- ・菊池雄星
- ・桐生祥秀
- ・早田ひな
- ・アルビレックス新潟
- ・川崎プレイブサンダース
- ・日本車いすバスケットボール連盟
- ・日本身体障害者アーチェリー連盟
- ・日本ソフトボール協会
- ・日本ブラインドサッカー協会
- ・日本ボッチャ協会



酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 札幌営業所 (北海道) | Tel: 011-780-5570 |
| 盛岡営業所 (青森・秋田・岩手) | Tel: 019-656-5336 |
| 仙台営業所 (宮城・山形・福島) | Tel: 022-390-6840 |
| 新潟営業所 (新潟) | Tel: 025-278-4777 |
| 長野営業所 (山梨・長野) | Tel: 0263-40-5014 |
| 埼玉営業所 (埼玉・群馬・栃木) | Tel: 048-662-4560 |
| 千葉営業所 (千葉・茨城) | Tel: 047-497-3691 |
| 東京営業所 (東京) | Tel: 03-5227-5779 |
| 東京営業所 (フィジオ) | Tel: 03-5227-5776 |
| 横浜営業所 (神奈川・静岡) | Tel: 045-590-5485 |
| 名古屋営業所 (愛知・岐阜・三重) | Tel: 052-263-9867 |
| 金沢営業所 (石川・富山・福井) | Tel: 076-292-1161 |
| 関西営業所 (大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山) | Tel: 06-6386-3545 |
| 神戸営業所 (兵庫) | Tel: 078-579-6236 |
| 広島営業所 (広島・岡山・山口・鳥取・島根) | Tel: 082-830-0420 |
| 高松営業所 (香川・徳島・愛媛・高知) | Tel: 087-865-0715 |
| 福岡営業所 (福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄) | Tel: 092-588-9331 |
| 鹿児島営業所 (鹿児島・宮崎) | Tel: 099-219-7250 |

取扱店



PHYSIO SONO

フィジオ ソノ 超音波治療器 P-SONO


医療機器認証番号: 230ALBZX00001000
管理医療機器 (クラスII)・特定保守管理医療機器

浅部・深部・広範囲に 幅広く使える超音波治療器

1つの超音波プローブで、浅部モード、深部モード、さらに全体を広範囲でカバーできるオルタネートモード発信も可能です。カラータッチパネルのシンプルな操作、バッテリー搭載で持ち運びもでき、院内からスポーツ現場まで、様々な場所でお使いいただけるコストパフォーマンスに優れた超音波治療器です。

0.1W/cm² の 低出力超音波も発信

3MHz、1MHz、高速で切り替えながら発信するオルタネートモードに加えて、急性期に適用できる0.1W/cm²の低出力超音波も出力可能です。

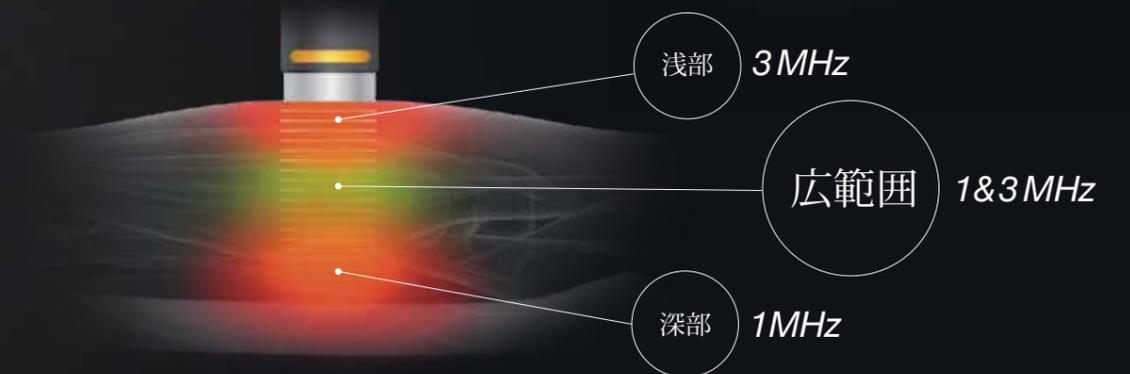

- 慢性期 -
温熱

Thermal effect

- 急性期 -
音圧

Micro massage

フィジオソノは
慢性期の温熱+音圧(非熱マイクロマッサージ作用)と、
急性期の0.1W/cm²低出力超音波の音圧作用が
一台で行えます。
平型固定タイププローブを使用すれば、プローブを
固定した状態での低出力超音波治療も可能です。

+ **PHYSIO ACTIVE HV**

接続するだけで コンビネーション治療

より高い効果性
短時間化

Combination

低周波治療器 フィジオアクティブ HV の出力コードを
フィジオソノに接続するだけで、超音波プローブから
超音波と同時に、フィジオアクティブ HV の
ハイボルテージ電流出力が可能です。

※ フィジオ アクティブ HV (認証番号 227ALBZX00014000)



30分駆動

バッテリーを搭載 **AC/DC両対応**

屋外など、コンセントによる電源供給ができない場所でも
30分の駆動が可能です。

※ 3MHz 出力、Duty100%、2.0W/cm² で約 50 分
1MHz 出力、Duty100%、2.0W/cm² で約 1 時間

急性期疾患に使える 平型固定タイププローブ

別売付属品

急性期の疾患に対して、
固定式低出力超音波治療も可能。

※ DUTY 設定あり。固定のためのベルトは別売付属品です。



カラータッチパネル

3.5インチカラータッチパネルを
搭載。直感的な操作で簡単に治療
が行えます。



マグネット吸着

超音波プローブは本体側面の他、
スチール面であればお使いのワゴン
など、どの場所にも吸着します。

※ 平型プローブはマグネット吸着しません。



フィジオアクティブ HV の出力
コードを、フィジオソノ背面に
接続 (専用の接続ケーブルなど
は必要ありません)



フィジオアクティブ HV の電流の出力を
上げるだけで、フィジオソノの超音波
プローブから電流が出力されます



超音波による温熱効果+音圧(マイクロ
マッサージ)と、ハイボルテージ電気療法に
よるコンビネーション治療が可能になります



平型固定タイプ
プローブでも出力
可能です