

エアレックスマット

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
「取扱説明書」はいつでも参照できるように、見やすい所に大切に保管してください。

ご使用上の注意

- 火気の多い場所でのご使用は避けてください。
- フローリング等の床の上で使用する場合は、最初に製品を水拭きして接着防止用の粉(タルク)を除去してからお使いください。
粉が床に付着すると、取り除きにくくなる場合があります。万一付着した場合は、鉄粉取り粘土などで粉を拭き取ってください。水で濡らすと目地に入り込んで、取りにくくなりますのでご注意ください。
- 使用前に破損などが無いことを確認し、破損していたら使用しないでください。
- 運動靴などの使用で、製品が破損する場合があります。製品により使用制限がありますので、下記を参照してください。

運動靴 使用不可 但し エアロビシューズなどの 室内用運動靴のみ 使用可	コロナ	AMF-300
	コロネラ	AMF-320
	フィットネス 120	AML-420
	フィットライン 140	AML-440
	フィットライン 180	AML-480
	ヨガピラティス 190	AML-550

運動靴 使用不可	アトラス	AMF-310
	ヘラクレス	AMF-330
	オリンピア	AMG-200
	ダイアナ	AMG-210

お手入れ

- 汚れた場合は、柔らかいブラシや中性洗剤を含んだぬるま湯で洗って水ですすぎ、水分をしっかりと拭き取り乾かしてください。
- 熱湯消毒などはしないでください。

保管

- 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- 折りたたんだままや濡れたままです長時間放置しないでください。

長時間放置すると、マットの表面がもろくなったり硬くなったりして劣化を早めることがあります。

マットが1枚のときは、丸めてストラップで留めての保管ができます。

同時に数枚保管するときは、マットスタンドにかけるか、平らに保管することをお勧めします。

丸めて保管した場合、マット外周にしわ等が付くことがあります。広げて使用していると元に戻ります。(ご購入時にも梱包によるしわが付いていることがあります。広げて使用していると元に戻ります。)

仕様

製品名	※1 型式	※2 寸法 長さ×幅×厚さ mm	質量 約 kg	パターン (上表面加工)
コロナ	AMF-300 R,B	1850×1000×15	3.8	両面波形
アトラス	AMF-310 R,WB	2000×1250×15	5.5	両面波形
コロネラ	AMF-320 R,B	1850× 600×15	2.2	両面波形
フィットネス 120	AML-420 B	1200× 600×15	1.4	両面波形
ヘラクレス	AMF-330 B,WB	2000×1000×25	6.6	両面波形
オリンピア	AMG-200 WB	2000×1250×32	11.0	両面ワッフル (プラスチックラミネート)
ダイアナ	AMG-210 WB	2000×1250×15	7.0	両面ワッフル (プラスチックラミネート)
フィットライン 140	AML-440 B	1400× 580×10	1.2	両面波形
フィットライン 140	AML-440 K	1400× 600×10	1.2	両面波形
フィットライン 180	AML-480 B,K,P,C	1800× 600×10	1.5	両面波形
ヨガピラティス 190	AML-550 P,C	1900× 600× 8	1.4	両面波形

- 材質：PVC(ポリ塩化ビニル)

※1 R：レッド，B：ブルー（フィットラインはウォーターブルー），WB：ウォーターブルー
K：キウイ，P：ピンク（ヨガピラティスはパープル），C：チャコール

※2 寸法は製造工程上、長さ・幅は±5%、厚さは±25%程度の誤差が生じる場合があります。

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町 358-6 〒162-0801

<http://www.sakaimed.co.jp>