

太陽のような 「ぬくもり」を

入浴する方より近くで、安全を見守りたい。
そんな声にお応えして、
どこからでも同じ高さでケアができる
浴槽縁高93cmを実現。
小柄な方でも入浴する方に手が届きやすく、
入浴中の様子をより近くで確認できます。





ゆりかごのような 「くつろぎ」を

入浴中はリラックスした姿勢で、
肩までゆったりお湯に浸かってほしい。
チルト機能が、安定した入浴姿勢を実現します。
体格に合わせて水深も調節でき、
大柄な方でも肩までお湯に浸かって温まります。





1 着衣ベッドの上で脱衣

幅が広くサイドフェンス付きの着衣ベッド上では、身体の向きも変えやすく、安心して脱衣が行えます。



2 ストレッチャーへ移乗

着衣ベッドとストレッチャーは同じ高さにして連結させることができ、スムーズに移乗できます。



3 担架の上で洗身

担架は幅が広く大型サイドフェンス付きなので側臥位での洗身も安心です。



4 浴槽内へ移動

スリムなストレッチャーで浴槽に近づきやすく、足元に一步踏み込めるスペースを設けることで、担架を移動する際の腰への負担を軽減します。

ケアする方、
入浴する方のストレスを
すべてのステップで軽減しました



チルト機能で姿勢が崩れにくく、前ずれを防ぎ肩までゆったりお湯に浸かれます。

5 入浴

どこからでもケアがしやすいよう、浴槽の縁高を93cmに設計しています。



浴槽



湯温や入浴時間が確認しやすい表示パネル



浴槽内の湯温や給湯時のお湯の温度、入浴時間がひと目で確認できます。

手が届きやすいサイド操作部



介助する方の立ち位置から、楽な姿勢で操作しやすい位置に設置しました。

安全性に配慮した3つの機能

火傷の危険を防ぐ温度管理システム

給湯温度が46℃以上になると給湯を自動停止。さらに浴槽内の湯温が44℃以上になると浴槽が上昇しない安全機構で入浴中の火傷を防ぎます。

万が一に備えた停電時下降レバー

入浴中に停電になった場合でも、レバーを回せば浴槽を下降させることができます。

連結ミスによる担架脱落を防止

ストレッチャーが浴槽に正しく連結されないや担架が浴槽内にスライドできない設計。連結後はランプでお知らせします。



担架



入浴姿勢が安定するピンクのマット



マットのピンク色の部分にお尻の位置を合わせると、安定した入浴姿勢がとれます。

お手入れのしやすさに配慮した担架カバー



担架カバー部は簡単に取り外しできるので、カバーの裏側やフレームの汚れも掃除しやすく衛生的です。

転落を防ぐ大型サイドフェンス



大型サイドフェンスに加え、上肢用サイドフェンスを装備。身体が担架からはみ出るのを防ぐので、安心して介助が行えます。

オプション

快適な入浴をサポート、「気泡浴装置」

きめ細かな気泡で、心地よい入浴をお届けします。

お湯を清潔に保つ「塩素殺菌装置」

厚生労働省の指針に基づく濃度で塩素殺菌。「浴槽殺菌」と「浴槽水殺菌」、2つのモードを装備しています。

お湯を循環させる「水処理システム」

お湯が一定量貯まると自動で作動し、循環してお湯をきれいに保ちます。
※水処理システムには塩素殺菌装置が標準装備されています。



標準カラー

オプションカラー

仕様	
浴槽	
型式	CAM-100C/CAM-100R/CAM-100L
外形寸法	長さ2510×幅980×高さ890~1190mm
浴槽内寸法	長さ1940×幅745×深さ550mm
質量	約450kg
湯量/実使用湯量	約495リットル/約375リットル(入浴者165cm、65kg)
最大使用者体重	100kg
電源	三相200V(50Hz/60Hz) 15A
電力	640/740W(50Hz/60Hz) ※CAM-10、30付
電源入力	1100VA(50Hz/60Hz) ※CAM-10、30付
材質	浴槽、カバー FRP フレーム スチール/粉体塗装仕上げ
昇降機能	昇降方式 電動油圧リフター方式:200V400W 昇降ストローク 300mm
自動給湯	適正水位自動停止
安全機構	インターロック機構、温度管理システム(高温給湯停止、浴槽内高温時上昇停止)、担架スライド防止装置、漏電ブレーカー
その他	・電動ミキシング・デジタル温度計・入浴時間表示 ・ハンドシャワー専用シャワー水栓・停電時下降用レバー
付属品	・浴槽クリーナーA・アワスプレー

オプション	
気泡浴装置	
型式	CAM-10
質量	約5kg
エアポンプ	単相200V
塩素殺菌装置	
型式	CAM-20
質量	約5kg
殺菌方法	塩素
薬液ポンプ	DC12V
付属品	希釈ボトル、次亜塩素酸ナトリウム
水処理システム	
型式	CAM-30
質量	約10kg
殺菌方法	塩素
薬液ポンプ	DC12V
循環ポンプ	単相200V
ストレーナー	ステンレス網
付属品	希釈ボトル、次亜塩素酸ナトリウム

オプション 手すり SWS-10



別売 バスクッションポジショナー BCT-1



濡れても重くならず、手軽に入浴中の姿勢保持にお使いいただけます。



バスクッション
ピロータイプ
CAW-105




スライド式枕タイプ
CAW-100

仕様		
担架		
型式	CAW-100	CAW-105
外形寸法	長さ1912×幅695×高さ299mm (手すり取付時) 長さ1912×幅695×高さ577mm	
質量	約43kg	
最大使用者体重	100kg	
材質	フレーム	ステンレス
	担架面、サイドフェンス	プラスチック(PP)
	マット、パッド	プラスチック(PE)
枕	プラスチック(PE)	ポリエーテルエステル系繊維
	背当てリクライニング(7°/50°) 安全ベルト(パッド付き)	
主な機能	マット サイドフェンス	

オプション	
手すり	
型式	SWS-10
質量	約4kg
材質	手すり本体:ステンレス グリップ:プラスチック(PVC)

ストレッチャー

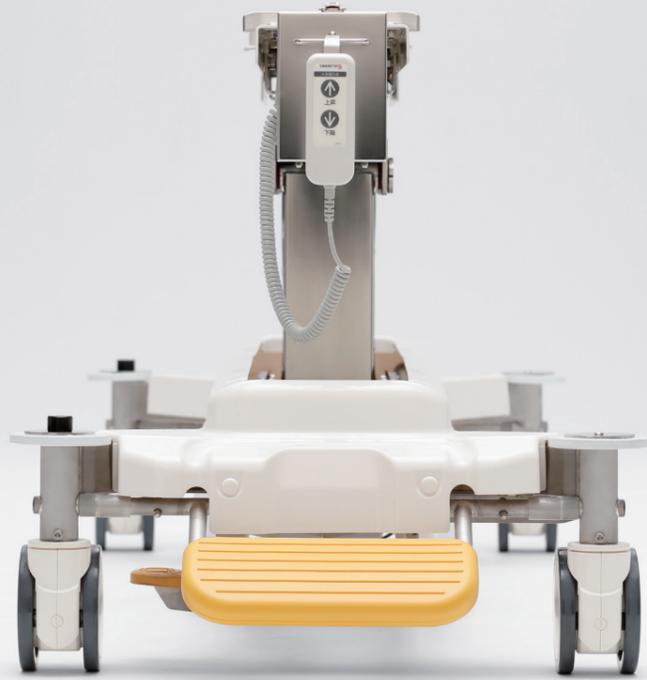

着衣ベッド



腰への負担を軽減する ハーフスライド構造



ストレッチャーがスリムなので浴槽近くに立つことができ、腰をかがめずに担架を浴槽内に送り込めます。

簡単に充電できる 着脱式バッテリー



バッテリーはストレッチャーから取り外して充電できます。
※高さ調節式ストレッチャーのみ

細やかな安心設計

トータルロック機構

一踏みですべてのキャスターをロックできます。



双輪キャスター

旋回や方向転換がしやすく、小回りがききます。



着脱衣がしやすいワイド幅62cm



ひとりでも身体の向きを変えやすく、入浴後は身体を拭いた後、そのままベッド上で着替えができます。

ひとりでもストレッチャーとの 連結が可能



着衣ベッドとストレッチャーを連結させることで、安心して移乗が行えます。



固定式ストレッチャー CAS-100R/L



高さ調節式ストレッチャー CAS-110R/L

仕様

固定式ストレッチャー	
型式	CAS-100R/CAS-100L
外形寸法	長さ1837×幅630×高さ682mm
担架面高さ	754mm
質量	約50kg
最大使用者体重	100 kg
材質	フレーム ステンレス(一部粉体塗装仕上げ) カバー プラスチック(ABS)
主な機能	担架スライド防止装置 担架検知装置 キャスター:φ125mm、トータルロック付き 解除ペダル

高さ調節式ストレッチャー	
型式	CAS-110R/CAS-110L
外形寸法	長さ1837×幅630×高さ382~682mm
担架面高さ	454~754mm
質量	約73kg
最大使用者体重	100 kg
駆動方式	電動アクチュエーター方式
電源	バッテリー DC24V
材質	フレーム ステンレス(一部粉体塗装仕上げ) カバー プラスチック(ABS)
主な機能	昇降:ストローク300mm 担架スライド防止装置 担架検知装置 キャスター:φ125mm、トータルロック付き 解除ペダル リモコン
付属品	バッテリー(1個)、充電器

別売 抱きかかえ移乗をゼロにする スライディングボード SB202431-SA

シートの回転を利用して
スライド移乗できます



スライディングボードを使うことで、ベッドから着衣ベッド、着衣ベッドからストレッチャーへの移乗を抱きかかえることなく行えます。



仕様

着衣ベッド	
型式	STY-100
外形寸法	長さ1900×幅716mm×高さ695~1073mm
マット寸法	長さ1844×幅620mm
質量	約50kg
最大使用者体重	100kg
昇降方式	ハンドル回転式
フレーム	アルミニウム
マット	スポンジ(PE)
連結部	ステンレス
昇降方式	ハンドル回転式
主な機能	昇降:ストローク378mm マット:ベルト固定式 サイドフェンス:ロック付き キャスター:φ150mm、トータルロック付き 走行制御機能:方向ロック
付属品	ストレッチャー連結部受け