

機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 家庭用貼付型接触粒(JMDNコード：71026000)

マイクロリカバリーパッチ

【警告】

使用方法

- ・再使用をしないこと。[病原微生物の感染を防ぐため]

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

- ・健全な皮膚に使用すること。[症状の悪化や感染の危険性があるため]
- ・金属アレルギー症状や絆創膏等でかぶれる体質の患者には使用しないこと。[発疹やかゆみの可能性があるため]
- ・妊婦 [胎児への影響が不明のため]

併用医療機器

- ・体内にペースメーカー、人工心肺などの通電性物質や金属を埋め込んでいる患者には使用しないこと。[金属粒の影響が不明なため]
- ・電気手術装置又は除細動器等と同時に使用しないこと。[故障や皮膚熱傷の原因になるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 本体（直径 30mm / 接触粒直径 7mm / 質量 1g）



2. 体に接触する部位の原材料

名称	原材料
粘着テープ	ポリエチレン、レヨン
保護材（不織布）	綿

3. 原理

本体中央部の金属粒を身体のコリの部分に貼付することによりコリを緩和する。

【使用目的又は効果】

一般家庭で使用し、貼付部位の「コリの緩解」を目的とする。

【使用方法等】

- ① ミニボトル(付属品)に水を入れる。
- ② 保護材に水を数滴垂らす。
- ③ 本体を剥離紙から剥がし、肩・腰・背中など、押さえて痛みを感じる箇所貼り付ける。

【使用上の注意】

- ・本品に破損などの異常が見られた場合、使用を中止すること。
- ・皮膚に腫れ、かゆみ、赤み、かぶれなどの異常が現れたら直ちに使用を中止し、すみやかに医師に相談してください。[症状が長期化する可能性があるため]
- ・保護材には水以外の液体や軟膏等を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間 3年 [自己認証(当社データ)による]
保管方法 周囲温度-5~50℃、相対湿度20~80%とする。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・本品の修理や改造をしないこと。
- ・本品は小児の手の届かないところに保管すること。
- ・不具合が見られた場合は使用せず販売店へご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：アイソン株式会社
〒332-0032 埼玉県川口市中青木3-12-21
TEL：048-299-3597
製造国名：大韓民国
製造業者名：LEADONE MEDICAL