

【柔道整復師 限定】

東京スプリントセミナー

オハイオT体験セミナー

最新固定はこれで決まり！

苦手な末端部位が短時間で簡単作成！

スプリントに興味のある初心者向けのスプリントセミナーです。

形状記憶性 100% 素材のオハイオ T を使用して、スプリント材の基礎知識、作成上のコツ、作成手順を学んでいただいた上で、実際に作成していただくハンズオンセミナーです。

お気軽にご参加ください。

スプリント
って何？

キャスト材と
何が違うの？

どうやって
作るの？

作って
みたかった！

セミナースケジュール

- 12:30～ 受付開始
- 13:00 スプリント素材の基礎知識
- 13:30 フィンガースプリント作成デモ
- 14:00 ハンズオン:フィンガースプリント
- 14:30 サムスプリント作成デモ
- 15:00 ハンズオン:サムスパイカ
- 15:40 質疑応答/まとめ
- 16:00 終了

kinetec[®]
manocast



●ハンズオン形式

ハンズオンは作成する方と患者役の方で2名1組になり、交代で作成していただきます。
フィンガースプリントは、スタックスプリント、シェルスプリント、スワンネックスプリントの作成デモンストレーションを行います。
いずれかのスプリントを作成ください。作成したスプリントは、お持ち帰りいただけます。
作成用ハサミ等は会場にて準備いたします。水切り用タオルはご持参ください。

開催日 | 2024年8月4日(日) 13:00～16:00

会場 | 酒井医療株式会社 本社

東京都新宿区山吹町 358-6 〒162-0801

募集 | 20名

参加費 | 1,000円/人

※当日は、参加費・筆記用具・バスタオルなどの必要器具をご持参ください。

お申込フォーム



お問い合わせ

酒井医療株式会社 リハビリテーション推進部

TEL:03-5227-5775 E-mail:splint@sakaimed.co.jp

作成時間5分！
汗を吸わず臭くならない！
装着して水仕事もOK！

kinetec[®]
manocast

各種スプリントの作り方を
動画で公開中！

酒井医療 スプリント簡易動画



NEW
2024



- 形状記憶素材はピッタリとしたフィット感を生み出します。
- マレットなどのフィンガースプリントであれば5分程度で作成が可能です。
- 抜群の形成のしやすさと優れた装着感で手外科分野では非常に人気の高いスプリントです。

形状記憶性 コーティング 加温70～75 伸張性◎

オハイオ-T

〈届出番号13B2X00081000047〉(一般) (ギプス包帯)

M10T1D11BK ブラック 各 ¥9,300
M10T1D11WH ホワイト


寸法 300×460mm/1.6mm厚
形状 11%穴あき



指のシーネ固定におすすめ！

シェル・スプリントの作成手順

シェルスプリント用のカットサンプルをプレゼントします

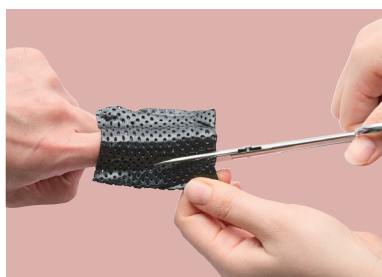

- ・ 指尖からPIPまでの2倍の大きさを用意
- ・ 指を挟み両端を留め、DIPを伸展位で固定する

- ・ 両端を切り取り、接着面を5mm幅で切り取る

- ・ PIPの可動域を妨げないよう全体をカットし、ペルクロテープを付けて完成