

創業 140 周年記念製品「シャワーポッド アラエル」

酒井医療株式会社は、1881年(明治14年)酒井嘉平治によって創業されました。1893年に日本初の電気治療器「ヒルシマン平流感伝電気機」の製造に成功するなど、前例がなくとも率先して新たな道を切り拓いてきた創業者の想いは、「初雪をかく」という伝統精神として明文化され、その後も、脈々と受け継がれています。世界中が新型コロナウイルス感染症という未曾有の危機にさらされる中で新たに誕生した『シャワーポッド アラエル』も、これまでに提供してきた製品同様、多くの人たちを幸せにする製品になることを目指しています。

RE:STORIES
140th
ANNIVERSARY
EST. 1881 SAKAIMED 1881
ONE HUNDRED
AND
FORTIETH



浴槽をまたげない方にも入浴していただける世界初のエレベート機能を備えた入浴装置を開発。



介助負担を軽減するために、入浴者を自動で浴槽へ移動できる世界初のオートスライド機構を搭載した「ロベリア」を開発。



接触を最小限に抑えながら入浴介助ができるシャワータイプの入浴装置「アラエル」を開発。

SAKAimed
明日に踏み出すチカラ。酒井医療

SHIP HEALTHCARE
GROUP

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

札幌営業所	(北海道)	Tel: 011-780-5570
盛岡営業所	(青森・秋田・岩手)	Tel: 019-656-5336
仙台営業所	(宮城・山形・福島)	Tel: 022-390-6840
新潟営業所	(新潟)	Tel: 025-278-4777
長野営業所	(山梨・長野)	Tel: 0263-40-5014
埼玉営業所	(埼玉・群馬・栃木)	Tel: 048-662-4560
千葉営業所	(千葉・茨城)	Tel: 047-497-3691
東京営業所	(東京)	Tel: 03-5227-5779
	(フィジオ)	Tel: 03-5227-5776
横浜営業所	(神奈川・静岡)	Tel: 045-590-5485
名古屋営業所	(愛知・岐阜・三重)	Tel: 052-263-9867
金沢営業所	(石川・富山・福井)	Tel: 076-292-1161
関西営業所	(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)	Tel: 06-6386-3545
神戸営業所	(兵庫)	Tel: 078-579-6236
広島営業所	(広島・岡山・山口・鳥取・島根)	Tel: 082-830-0420
高松営業所	(香川・徳島・愛媛・高知)	Tel: 087-879-8840
福岡営業所	(福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄)	Tel: 092-588-9331
鹿児島営業所	(鹿児島・宮崎)	Tel: 099-219-7250

AR (拡張現実) で実際の空間に「アラエル」を設置したイメージを確認することができます。



【動作環境】

- デバイス Android: ARCoreサポート端末、iOS: ARKitサポート端末 (A9以降のプロセッサ端末)
- OS Android 7.0 Nougat (API Level 24) 以降、iOS11以降
- 推奨ブラウザ Safari / Google Chrome

取扱店

Shower Pod
araeru

アラエルだから、洗える。





SAKAimed

洗える、シャワーポッド。

短時間で汚れをしっかりと落とせる洗浄力に加え、
衛生面と使いやすさを極限まで追求。

介助する人、介助される人、
皆が快適になるバスタイムを提供します。

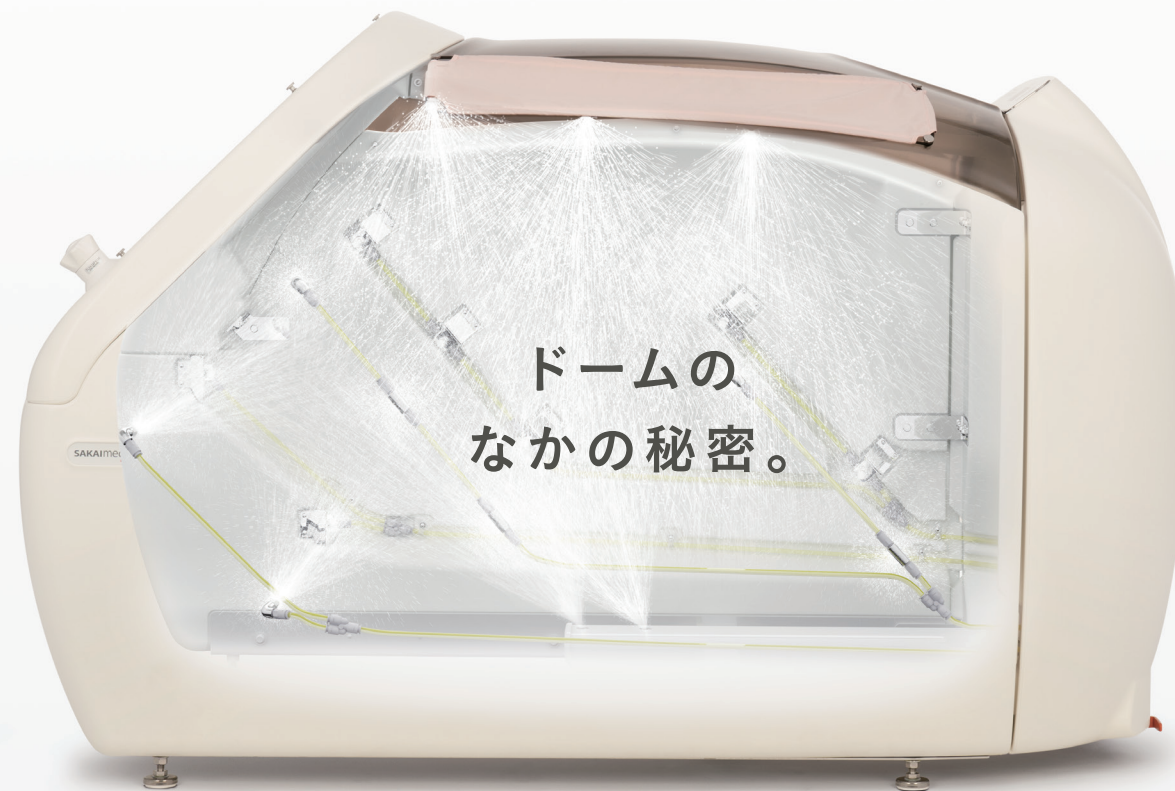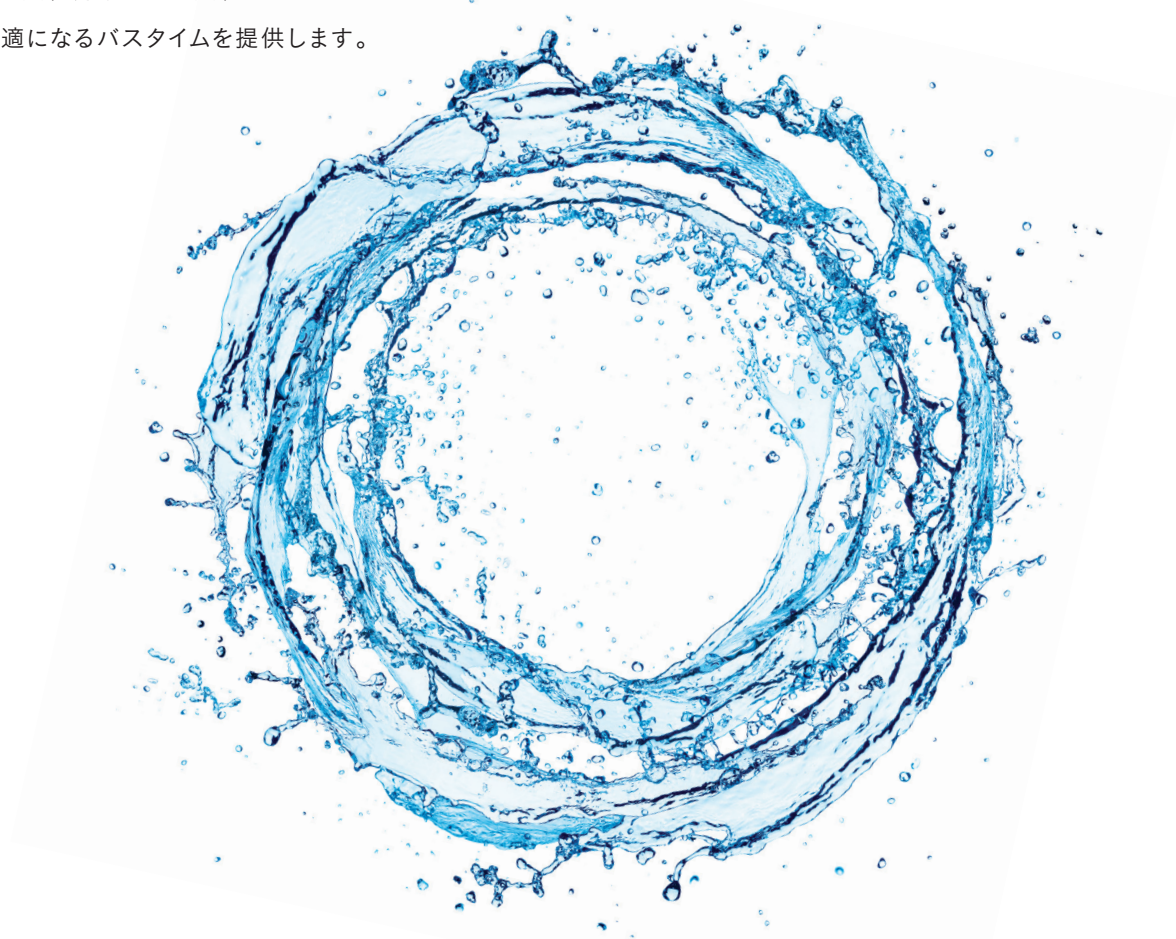

絶妙な位置に配置されたシャワーノズルで、
背中もデリケートゾーンも全身くまなく洗える、シャワーポッド。それがアラエルです。
ドームに入れば、誰でもあっという間に清潔に。

アラエルで、 入浴介助をアップデート。

介助する人にも介助される人にも快適で衛生的なバスタイムを。
そんな想いから、「シャワーポッド アラエル」は生まれました。
アラエルは、テクノロジーの力で入浴介助のアップデートを目指します。
アラエルだから、洗える。洗えるから、叶うことがある。



アラエルの W 洗身機能

W 洗身機能

01

陰部・臀部専用シャワー



W 洗身機能

02

ウルトラファインバブルシャワー



洗える、幸せ。

araeru, happiness

Shower Pod
araeru

絶妙な位置に配置されたシャワーノズルで、全身くまなく洗える。

アラエルの一番の魅力は、その名の通り、「洗える」力に優れていることです。


長年の経験と蓄積されたデータにより得られた知見、そしてこれまでの開発で培ってきた技術をもとに、

洗いたいところ・洗うべきところ・洗にくいところにしっかりシャワーが当たる位置や角度を導き出し、シャワーノズルを配置しました。



合計22基のシャワーノズルを配置

これまでのシャワー浴では洗い残しが多かったおしりや背中もしっかり洗えるように、効率よくシャワーノズルを配置しました。

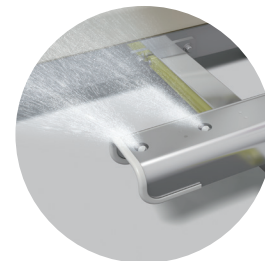

陰部・臀部も しっかり洗えるおしりシャワー

洗にくい部位の洗浄をサポートする専用ノズルを配置。シャワーの吐出量はおしりシャワーレバーの操作で調整できます。

ウルトラファインバブルでしっかりきれい。入浴後も温かさが持続します。


POINT
01

洗浄力



汚れをしっかりと落とす

アラエルが「洗える」力に優れている、もう一つの原因。それがウルトラファインバブルシャワーによる洗浄力です。直径が1μm(マイクロメートル)未満の肉眼では見えない泡が、シワや毛穴の奥まで入り込み、汚れをしっかりと落とします。また、お肌の潤いを保つ効果もあります。

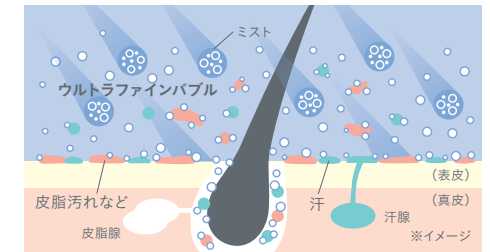

POINT
02

保温効果




シャワー浴なのに身体の芯まで温かい


貯湯式とアラエルに5分間入浴した後の表面温度を測定。シャワードームの気密性と、ウルトラファインバブルの超微細な気泡により、身体の内まで温め、入浴後もぽかぽかが持続します。



貯湯式 10分後

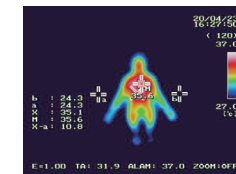


アラエル 10分後

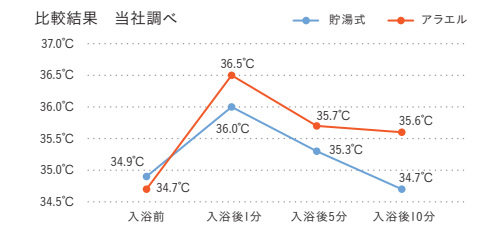


POINT
03

節水効果

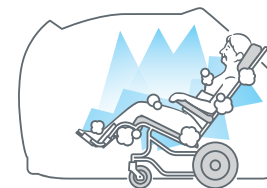

3min

1名が3分間入浴した場合の使用湯量

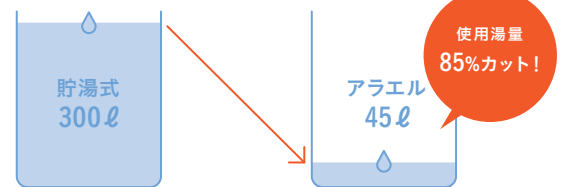

※当社個浴タイプと比較 ※実使用湯量は入浴時間とご利用者の体格により変動します。

※ウルトラファインバブル機能は株式会社サイエンスの製品を使用しています。

※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

※ウルトラファインバブルの性能・効果については <https://i-feel-science.com/> をご覧ください。

介助する方の負担を大幅に軽減。洗えると、こんなにも快適に。

身体の間々までしっかり洗えるアラエルを導入すれば、
これまで入浴介助に費やしていた時間や労力を大幅にカットでき、
介助する方の負担軽減に繋がります。



ケアがしやすい介助口

スリット式カーテンを装着した介助口。水はねを気にせず入浴ケアを行います。



広々とした観察窓

ドームの中の様子がしっかり視認できるので、介助時の見守りに最適。



洗髪も同時に行えます！



ボタン一つでしっかり洗えて、負担は軽減。

「おまかせ洗身」ボタンを押すだけで、「予洗い」「洗身」「洗い流し」まで完了できる「おまかせモード」を搭載。
シャワー式なので湯を貯める必要もありません。



お湯張り不要

入浴準備の時間短縮と
水道料金の削減を
同時に実現



予洗い

ウルトラファインバブル

シャワーのみ

>



洗身

ウルトラファインバブル

ボディシャンプー混合

>



洗い流し


ウルトラファインバブル

シャワーのみ


シャワードームとシャワーチェアの清掃もらくらく。

アラエルをいつも衛生的に保つため、清掃作業用の「除菌・洗浄モード」を搭載。
シャワードームとシャワーチェアの「除菌・洗浄」もボタン一つで行えます。

除菌洗浄剤を添加したウルトラファインバブルシャワーで隅々まで洗えて、
清潔な環境をキープします。

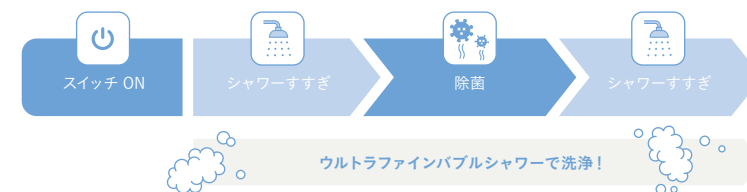

除菌・洗浄
モード
による清掃

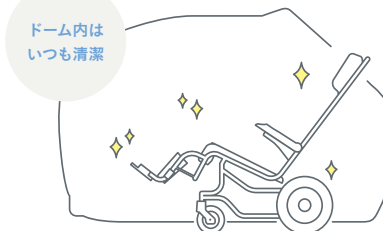

ドーム内は
いつも清潔

秘密は、ドームのそとにも。

Secrets outside araeru


Shower Pod
araeru

外は小さく、中はゆっтарいの省スペース設計。

長さ1750mm×幅1130mmというコンパクトなシャワードーム。
なのに中の空間は広々としていて、まるでミニバンのような設計です。
小さな浴室でもゆったり快適にお使いいただけます。



左右、正面、どこからでも出入りできる
進入口に開閉扉がついていないため、シャワードーム
への出入りもフレキシブル。

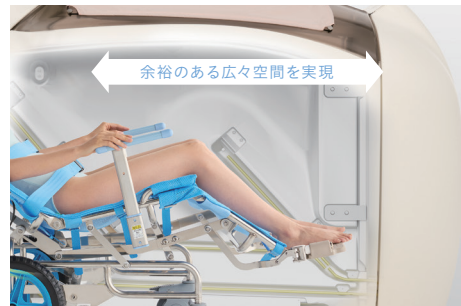

ドームの中は広々空間
足元に余裕を持たせた作りになっていて、大柄な方
でも快適に入浴いただけます。



別置給湯ユニットは、
浴室のレイアウトに合
わせて設置場所を検討
いただけます。

質量約25kgの軽量設計、 安定感にも優れたアラエル専用シャワーチェア。



軽い力で誰でも簡単に操作できる、4段階リクライニング機能。

腰や背中への負担を軽減し、姿勢を安定させることができます。
また、大柄な方から小柄な方まで、体型や状態に合わせて幅広く対応しています。



アラエルを、もっとよく知る。

Get to know araeru better

Shower Pod
araeru

アラエルは、“誰にでも安心して使える”シャワー入浴装置です。

使いやすさへの徹底したこだわりも、アラエルの大きな特長の一つです。

無駄のない動作で機器の操作や介助ができ、

もちろん安全性への配慮も十分考えられています。

誰にでも安心して入浴介助をしていただけます。



見やすい表示パネル

43℃以上または37度以下になると表示温度が点滅します。



操作パネル (モード設定)

使いたい機能をボタン1つで実行できます。



操作パネル

直感的な操作を想定したタッチ式。「ぬるく」「あつく」ボタンで36℃から45℃までの間で1℃毎に設定できます。

機器の操作範囲

少ない動き(手の届く範囲)で、機器の操作・介助を行うことができます。

温度管理機能

湯温が設定温度±3℃の範囲外と36℃～45℃の範囲外になるとシャワーがストップし、操作パネルのボタンランプが点滅してお知らせします。

標準付属品：消耗品



シャワー入浴装置専用 ボディシャンプーS

泡立ち、泡切れが良く、潤いを残して洗いあげるお肌に優しい弱酸性ボディシャンプー

成分：水、ラウラミドプロピルベタイン、ラウレス-4 カルボン酸Na、ココミドプロピルベタイン、グリチルリチン酸2K、カワラヨモギ花エキス、加水分解コラーゲン、BG、クエン酸、EDTA-4 Na、香料、メチルパラベン

容量：4kg



ドーム洗浄用 除菌洗浄剤 ネオアルベストAC

ドーム内外の汚染除去にも適した第4級アンモニウム塩配合の環境用除菌洗浄剤

成分：界面活性剤(陽イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤)

容量：4kg

オプション



ウルトラファインバブル生成シャワーヘッド ミラブル Zero


「ミラブル Zero」は、毛穴の奥まで届くウルトラファインバブルを生成する優れた洗浄効果を持つシャワーです。シャワーヘッドを取り替えるだけで、洗顔や洗髪はもちろん、浴室のお掃除にも効果を発揮します。

※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
※ウルトラファインバブルの性能・効果については <https://i-feel-science.com/> をご参照ください。

仕様


シャワードーム		
型式	ARA-100	
外形寸法	シャワードーム本体	長さ1750×幅1130×高さ1137mm
	給湯ユニット	長さ590×幅600×高さ640mm
シャワードーム内寸法	長さ1605×幅742×高さ1004mm	
質量	シャワードーム本体	約85kg
	給湯ユニット	約55kg
最大使用者体重	100kg	
電源	単相100V (50/60Hz) 15A、アース付	
電力	260W (50/60Hz)	
電源入力	400V A (50/60Hz)	
シャワーノズル数	上部6基(3個×2列)	
	サイド部10基(5個×2列)	
	後部4基(2個×2列)	
	下部2基	
実使用湯量 (ノズル吐出湯量)	約15.0リットル毎分 (給湯水圧力0.3MPa時)	
材質	フレーム	ステンレススチール
	シャワードームカバー	プラスチック (PP)
	給湯ユニットカバー	プラスチック (塩ビ)
	観察窓	プラスチック (塩ビ)
安全機構	カーテン	ポリエステル布
	温度管理システム (設定温度±3℃の範囲外、高温低温時自動排水)	
その他	電子制御ミキシング、給湯温度表示、 入浴時間表示、観察窓、介助口(両側各1ヶ)、 ハンドシャワー専用シャワーミキシングバルブ	
付属品	浴槽クリーナー-A、アウスブレー、 入浴用シャンプー4kg、除菌洗浄液4kg	

ARA-100(単位:mm)

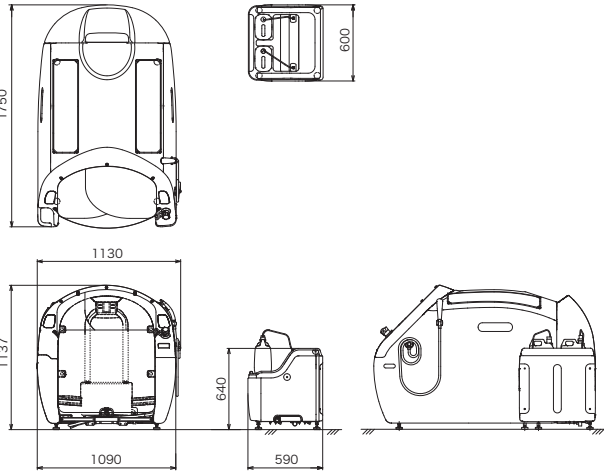



入浴用車椅子 リクライニング式		
型式	ARA-110C	
外形寸法	リクライニング角度1段目	長さ1050×幅599×高さ1095mm
	リクライニング角度2段目	長さ1367×幅599×高さ963mm
	リクライニング角度3段目	長さ1468×幅599×高さ879mm
	リクライニング角度4段目	長さ1630×幅599×高さ593mm
質量	約25kg	
最大使用者体重	100kg	
座面高さ	498mm(リクライニング角度1段目)	
材質	フレーム	ステンレス(ミガキ仕上げ)
	ヘッドレスト	プラスチック (PA)
	メッシュシート	プラスチック (PA)
	安全ベルト	プラスチック (PEs)
	上肢サポート	ステンレス(スポンジ付き)
	アームサポート	ステンレス+ゴム
	マット(背もたれ用・座面用)	プラスチック (EVA)
	レッグサポート	プラスチック (PA)
	フットレスト	プラスチック (PP)
	背面ハンドル・操作レバー	ステンレス
	背面ハンドルカバー	プラスチック (PA)
	車輪ロックペダル	アルミニウム(アルマイト仕上げ)
転倒防止バー		ステンレス+ゴム
キャスター (前輪)	プラスチック (PA) φ125 首振りあり キャスターロック	
車輪 (後輪)	プラスチック (PP+EVA) φ300 首振りなし 2輪同時ロック	
背もたれ角度	93°/120°/131°/165°	
座面角度	17°/15°/14°/8°	
その他	フットレスト、上肢サポート(開閉式) アームサポート(上下作動式)	
付属品	シリコングリス、刷毛	

ARA-110C(単位:mm)

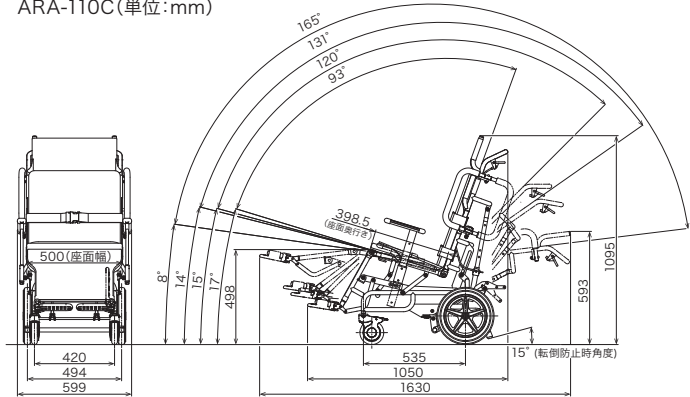

入浴用車椅子		
型式	ARA-100C	
外形寸法	標準姿勢時	長さ1023×幅621×高さ1240mm
	チルト時	長さ1263×幅621×高さ976mm
質量	約15kg	
最大使用者体重	100kg	
座面高さ	446mm	
材質	フレーム	アルミニウム+粉体塗装仕上げ
	ヘッドレスト	プラスチック (PP+PA+PE)
	メッシュシート	プラスチック (塩ビ)
	安全ベルト	プラスチック (PA)
	アームサポート	アルミニウム+粉体塗装仕上げ(スポンジ付き)
	マット(背もたれ用)	プラスチック (EVA)
	マット(座面用)	プラスチック (EVA)
	レッグサポート	プラスチック (PP+PA+PE)
	フットレスト	プラスチック (PP)
	背面ハンドル	アルミニウム+粉体塗装仕上げ
キャスター (前輪)	プラスチック (PUR) φ151.5 首振り有り ロックなし	
	プラスチック (PUR) φ300 首振りなし 2輪同時ロック	
車輪 (後輪)	プラスチック (PUR) φ300 首振りなし 2輪同時ロック	
背もたれ角度	100°	
座面角度	標準姿勢時	0°
	チルト時	25°
その他	ヘッドレスト(高さ調節式)、 フットレスト(開閉式、取外し式)、 アームサポート(跳ね上げ式)	
付属品	マットピンフォーク	

ARA-100C(単位:mm)

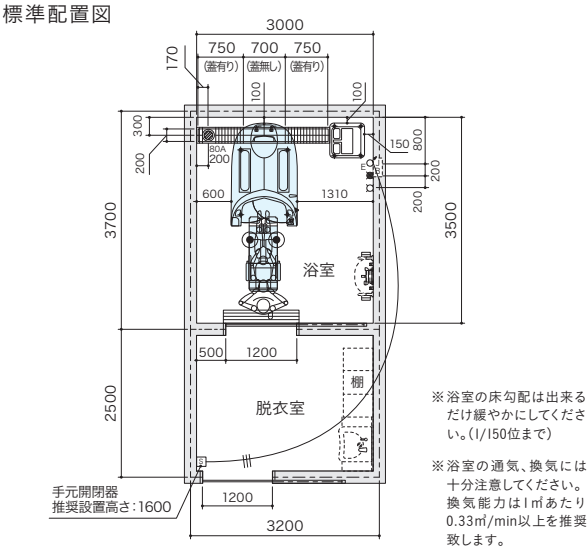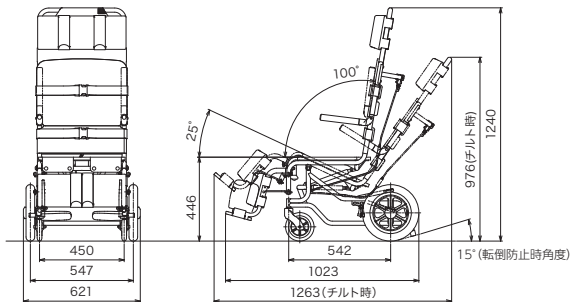

シャワーポッド アラエル ARA-100		
設備	仕様	工事区分
給湯水	給湯温度:60℃～65℃(立ち上がり位置での温度) 給湯水圧力:100～300kPa(1.0～3.0kgf/cm ²) ※圧力変動を極力避けてください 湯水圧力比:2:1～1:2以内 流量:20L以上/min(湯水共) 給湯器:(号数)50号 ※単独で必要です (設備)立ち上げ:各20A 壁面ボールバルブ止め 高さ:FL+800 壁面から100mm以上にしてください (レバーが指示通りとなるようボールバルブ取付のこと) 各々、浴室または浴室近辺に元バルブを設置してください ※受水槽を備えた設備に水配管を接続し水道管に直結しないでください	設備工事
排水	排水ピット:深さ200mm 清幅:200mm 排水目皿:80Aトラップ付×1ヶ所 必要排水能力:0～60秒 30L	建築工事 設備工事
電源	電圧:単相100V 50/60Hz 所要電源容量:400VA (設備)ジャンクションボックス:1口用スイッチボックスを壁面に設置(設置高さ:FL+800) 電線管:ハイフレックススルー樹脂コート相当品を使用してください 呼び 17 長さ:3000mm 電線:1.6mm ² 又は2.0mm ² ×3芯 電線管端より300出してください アース:D種接地工事 手元開閉器:単相100V15A防雨型(浴室外に設置ください) 漏電遮断器:単相100V15A(浴室外の配電盤に設置ください) 高感度高速型 感度電流30mA 動作時間0.1秒以内 ※電源は単独の専用回路にしてください。	電気工事

注1) 搬入路は有効開口1200以上、有効通路幅1600以上が必要です。